

WURZELKANALAUFBEREITUNG


MicroMega
One Curve mini
Rationale Aufbereitung

micromega.coltene.com

 **COLTENE**

- Erhaltung des peri-zervikalen Dentins
- Entfernung eines Minimums an Zahnschubstanz¹
- Berücksichtigung der Wurzelkanalanatomie²
- Schaffung eines optimalen Raums für eine tiefe Desinfektion und eine ordnungsgemäße Obturation

Protokoll MicroMega One Curve mini*

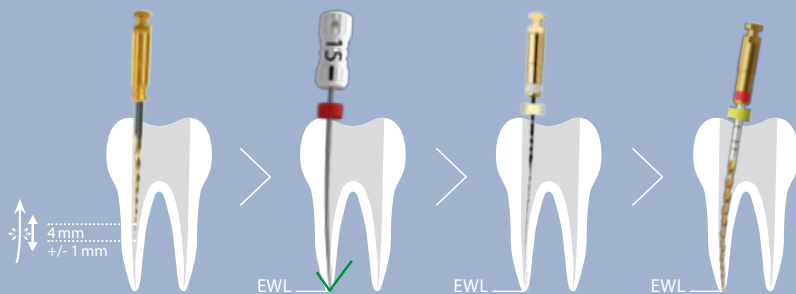

MicroMega:	One Flare	K-File	One G 14/.03	One Curve mini 25/.06
Drehzahl:	250-400 U/min	N/A	250-400 U/min	300-450 U/min
Max. Drehmoment:	3 Ncm	N/A	1,2 Ncm	2,5 Ncm

Schließen Sie die Behandlung mit passenden Guttapercha- und Papierspitzen ab.

Eigenschaften

- Kleine Größe / Konizität
- Ø 1 mm Draht
- C.Wire Wärmebehandlung
- Schneideeffizienz
- Single-File
- Steriler Blister
- 3 Längen: 21, 25, 31 mm
- Größen 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04



Für weitere Informationen über MicroMega One Curve mini scannen Sie bitte den QR-Code.

Bestellinformationen

MicroMega One Curve mini, 5 Stk./Packung (B5)

60030021	B5 One Curve mini N25 4% L25 Sterile	
60030022	B5 One Curve mini N25 6% L25 Sterile	
60030023	B5 One Curve mini N35 4% L25 Sterile	
60030024	B5 One Curve mini N45 4% L25 Sterile	
60030034	B4 One Curve mini L25 Assorted Sterile	

(1) Survey analysis "Minimally Invasive", Caroline Dort, 2022-01-13

(2) Evaluation of Canal Transportation and Centering Ability of 4 Heat-Treated Nickel-Titanium Systems, JOE, 2020 May;46(5):675-681. doi: 10.1016/j.joen.2020.01.020. Epub 2020 Mar 11., Christina Razcha, Athanasios Zacharopoulos, Dimitris Anestis, Georgios Mikrogeorgis, Giannis Zacharakis, Kleoniki Lyroudia

* Auszug aus der Gebrauchsanweisung.

© COLTENE – micromega.coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
FR-25000 Besançon
T +33 3 81 54 42 42
commercial@micro-mega.com



COLTENE