

CanalPro

Empfohlenes Spülprotokoll

Anlegen von Kofferdam und Desinfektion des Zahnes mit **CanalPro NaOCl 3%**

Spülen während der Aufbereitung mit **CanalPro NaOCl 3%** oder **6%**

Entfernung Schmierschicht nach Aufbereitung: 1 Min. Spülung mit **CanalPro EDTA 17%**

CanalPro NaOCl 3% oder 6% (mind. 10 ml 5 Min.)

Canal Pro CHX 2% (mind. 10 ml und 5 Min.)

CanalPro NaOCl 3% oder 6% (mind. 10 ml 5 Min.)

Neutralisierung von **NaOCl** mit 0,9%
NaCl Lösung/Alkohol

Spülung mit **CanalPro CHX 2%**
(mind. 10 ml und 5 Min.)

Trocknen mit **ROEKO / HyFlex Papierspitzen** und/oder **ROEKO Surgitip-endo**

Obturation mit **ROEKO GuttaFlow2 / bioseal**

Wichtig! Nach der Anwendung von **NaOCl** und vor der Anwendung von **CHX** muss der Wurzelkanal mittels einer Zwischenspülung (z.B. mit NaCl oder Alkohol) neutralisiert werden. **Hinweis:** Vor der Längenmessung mit Apexlokatoren wird meistens das Spülen mit NaCl empfohlen.

CanalPro SyringeFill Bestellinformationen



CanalPro SyringeFill	REF
CanalPro SyringeFill Station (1 x Flaschenträger inkl. Sockel, 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031347
CanalPro SyringeFill Holder (1 x Flaschenträger zur Wandmontage, 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031348
CanalPro SyringeFill Cap (Deckel mit integriertem Luer-Lock)	60019662
CanalPro Spüllösungen	
CanalPro NaOCl 3%, 500 ml	65002866
CanalPro NaOCl 6%, 500 ml	65002867
CanalPro EDTA 17%, 500 ml	60019651
CanalPro EDTA 17%, 100 ml	60019654
CanalPro CHX 2%, 500 ml	60019658
CanalPro CHX 2%, 100 ml	60019659
CanalPro farbige Spritzen	
CanalPro farbige 5ml Spritzen rot, 50 Stk.	60019321
CanalPro farbige 5ml Spritzen blau, 50 Stk.	60019322
CanalPro farbige 5ml Spritzen gelb, 50 Stk.	60019323
CanalPro farbige 5ml Spritzen weiß, 50 Stk.	60019324
CanalPro farbige 10ml Spritzen rot, 50 Stk.	60011173
CanalPro farbige 10ml Spritzen blau, 50 Stk.	60011174
CanalPro farbige 10ml Spritzen gelb, 50 Stk.	60011175
CanalPro farbige 10ml Spritzen weiß, 50 Stk.	60011176
Spülnadeln	
CanalPro Slotted-End Tips 27 ga, 100 Stk.	60011167
CanalPro Slotted-End Tips 30 ga, 100 Stk.	60011168
CanalPro Side-Port Tips 27 ga, 100 Stk.	60011169
CanalPro Side-Port Tips 30 ga, 100 Stk.	60011170

Impressum / Herausgeber

Coltene/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 CH-9450 Altstätten
 +41 71 757 5300
 info.ch@coltene.com

Vertriebskontakt

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 DE-89129 Langenau
 +49 7345 805 0
 info.de@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
 00 800 11 0000 12 (UIFN)
 Mo. bis Fr. 8:00 bis 17:00 MESZ