

roeko Surgitip-endo

Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts die Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Surgitip-endo ist eine Absaugkanüle, die speziell zur Trocknung des Wurzelkanals entwickelt wurde. Der Außendurchmesser des Canal Tip ermöglicht ein Einbringen der Surgitip-endo in nach ISO 60 präparierte Wurzelkanäle.

Es handelt sich um ein Handgerät, das direkt an eine Absauganlage oder mit einem Adapter als Zwischenstück angeschlossen werden kann. Die Absauganlage dient der Entfernung von Flüssigkeiten und Gewebebestandteilen aus der Mundhöhle. Das innovative Design der Spitze verleiht Surgitip-endo eine dreidimensionale Rundumbeweglichkeit. Diese Flexibilität ermöglicht ein Einbringen auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle, ohne dass hierfür der Canal Tip verbogen werden muss. Die Saugleistung bleibt uneingeschränkt hoch und die Sicht auf das Behandlungsfeld ungestört.

2. ZWECKBESTIMMUNG

Surgitip-endo ist eine Absaugkanüle für die Anwendung bei endodontischen Eingriffen und wurde speziell zur Trocknung des Wurzelkanals entwickelt.

3. ZUSAMMENSETZUNG

Surgitip-endo besteht aus einem PVC-Rohr und einer Spitze mit Verbindungsstück, drei Kugelteilen und einem Canal Tip. Die Bestandteile des Tip bestehen aus Polypropylen.

4. INDIKATIONEN/KLINISCHER NUTZEN

Absaugen von Flüssigkeiten bei endodontischen Eingriffen. Trocknung des Wurzelkanals vor dem Füllen. Der Wurzelkanal wird effektiv getrocknet. Durch das gründliche Trocknen der Kanäle wird eine erhöhte Haftung der Füllungsmaterialien an den Wurzelkanalwänden sichergestellt.

5. KONTRAINDIKATIONEN

N/A

6. SICHERHEITSHINWEISE

N/A

7. NEBEN- UND WECHSELWIRKUNGEN

Für dieses Produkt sind keine Neben- oder Wechselwirkungen bekannt.

8. ANWENDER-/PATIENTENGRUPPE

Dieses Produkt wird von Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachangestellten angewendet. Surgitip-endo ist für alle Patientengruppen geeignet.

9. VORBEREITUNG

Surgitip-endo ist ein steriles Produkt und sollte nur unmittelbar vor dem Einsatz im Rahmen eines operativen Eingriffs aus der Verpackung entnommen werden. Die Sterilität unbeschädigter, ungeöffneter Verpackungen wird garantiert. Vor der Anwendung beschädigte Verpackungen sind zu verwerfen.

Der schwarze Pfeil auf dem sterilen Beutel ermöglicht ein leichtes Öffnen der Peelpackung. Ein Adapter kann als Verbindungsstück zwischen der Absaugkanüle und der Absauganlage des Behandlungsstuhls verwendet werden. Bitte die entsprechende Aufbereitungsanweisung des Adapters beachten.

10. ORDNUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

- Formen Sie den beweglichen grünen Kugelteil so, dass die Spitze senkrecht in den Kanal eingebracht werden kann. Dank der dreidimensionalen Beweglichkeit des Kugelgelenks ist dies ohne ein Abknicken des Canal Tip möglich.
- Ein Überstrapazieren der Gelenke durch einen Biegewinkel von mehr als 90° sollte jedoch vermieden werden.
- Führen Sie während des Absaugens leicht tupfende Bewegungen aus.
- Um ein Verstopfen der Kanüle zu verhindern, kann diese zwischendurch mit Wasser gespült werden.
- Die sehr feine Ansaugöffnung des Canal Tip eignet sich nicht, Gewebe und/oder größere Partikel abzusaugen. Diese können wie bisher auch mit der Surgitip oder Surgitip-micro ausgespült und abgesaugt werden.

11. PRÜFMETHODE DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ANWENDUNG

N/A

12. AUFBEREITUNG, REINIGUNG, DESINFEKTION UND WARTUNG

N/A

13. EINMALGEBRAUCH

Surgitip-endo ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Das Produkt darf nicht aufbereitet werden. Nach einer Aufbereitung können Sicherheit, Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit des Produkts nicht mehr garantiert werden.

14. HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Siehe Ablaufdatum und Symbole auf der Verpackung.

15. ENTSORGUNG

Surgitip-endo kann mit den Praxisabfällen entsorgt werden, sofern lokale Vorschriften nichts anderes vorsehen.

16. TECHNISCHE DATEN

N/A

17. MELDEPFLICHT

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Do not re-use



Keep dry



Limits of temperature



Conformity mark Ukraine



Manufacturer



Use-by date



Single sterile barrier system



Do not resterilize



Batch Code



Sterilized using irradiation



Restricted device for professional use only



Medical Device



Date of manufacture



Do not use if package is damaged and consult instructions for use



Catalogue number

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstr. 30
 89129 Langenau/Germany
 Tel.: +49-7345-805-0
 info.de@coltene.com
 www.coltene.com

COLTENE