

BRILLIANT Lumina

Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts die Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

BRILLIANT Lumina ist ein Produkt zur professionellen Zahnaufhellung, das aus zwei Komponenten (Gel und Aktivator) besteht. Das Produkt ist für eine einmalige Behandlung vorgesehen.

2. VERWENDUNGSZWECK

BRILLIANT Lumina ist für die externe Aufhellung der Zahnschmelzsubstanz zum Zweck der kosmetischen Verbesserung des Patientenlächelns bestimmt.

HINWEIS

Das Aufhellungsergebnis ist abhängig von der klinischen Situation des jeweiligen Patienten. Restaurationen müssen nach der Behandlung eventuell ersetzt werden.

3. INHALTSSTOFFE (INCI)

Gel: Aqua (Wasser), Phthalimidoperoxycapronsäure, Glycerin, Xanthangummi, Mononatriumcitrat, PVM/MA Copolymer, Natriumhydroxid, C12-15-Pareth-3

Aktivator: Aqua (Wasser), Natriumhydroxid

4. KONTRAINDIKATIONEN

Bei bekannten Allergien auf Inhaltsstoffe des Produkts ist auf eine Anwendung zu verzichten.

Das Produkt ist nicht für die Anwendung bei Patienten außerhalb der vorgesehenen Patientengruppe bestimmt.

5. VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Handhabung des Gels müssen Schutzbrille und Schutzhandschuhe getragen werden.

⚠️ WARNUNG

Gel: Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen.

Aktivator: Direkten Kontakt mit dem menschlichen Körper (Haut/Augen/Schleimhäute) vermeiden. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. **KEIN** Erbrechen herbeiführen. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

6. NEBEN- UND WECHSELWIRKUNGEN

Es kann zu einer Reizung des Zahnfleisches und/oder der Mundschleimhaut kommen, wenn der flüssige Kofferdam nicht korrekt platziert wird oder das angemischte Gel mit Weichgewebe in Kontakt kommt. Das Gel sofort mit einer feuchten Kompresse vom Gewebe entfernen und den Bereich gründlich spülen.

7. ANWENDER- / PATIENTENGRUPPE

Anwendung nur durch zahnmedizinisches Fachpersonal. Für alle Patientengruppen geeignet, einschließlich älterer Menschen, mit Ausnahme von

Kindern und schwangeren/stillenden Frauen, Patienten mit oralen Erkrankungen (z. B. Parodontalerkrankungen) und/oder schwerkranken Patienten.

8. VORBEREITUNG

Vor der Zahnaufhellung muss eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt werden (vollständige Entfernung des Biofilms).

Den Wangenhalter einsetzen. Zwischen Lippen und Zähnen eine Watterolle einlegen. Die Zahnoberfläche und das Zahnfleisch mit einer Dreiwegespritze trockenlegen.

① Vollständige Isolierung mit flüssigem Kofferdam gemäß den Herstellerangaben.

9. ORDNUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG

Eine Behandlung umfasst vier Anwendungszyklen von je 15 Minuten:

② Drei Tropfen des Aktivators in das Behältnis mit Gel geben.

③ Mit einem Spatel 60 Sekunden lang zu einer homogenen Masse vermischen.

④ Das Gel mit einem Spatel auf die Zähne applizieren.

⑤ Das Gel 15 Minuten lang einwirken lassen.

⑥ Das Gel von den Zähnen absaugen. Gelreste mit einer Zahnwatterolle abwischen. Nicht mit Wasser spülen.

Die Schritte ② bis ⑥ dreimal wiederholen.

⑦ Nach Abschluss der Behandlung den Mund 60 Sekunden lang mit Wasser ausspülen.

⑧ Zahnfleischschutz gemäß den Herstellerangaben vollständig entfernen.

HINWEIS

Es ist stets auf die korrekte Platzierung des Zahnfleischschutzes zu achten.

Ein Patient kann mehrmals mit BRILLIANT Lumina behandelt werden. Zwischen den einzelnen Behandlungen muss ein Abstand von 14 Tagen eingehalten werden.

10. LAGERUNG

Verfalldatum: siehe Umverpackung

Lagertemperatur: 15–25 °C / 59–77 °F

Trocken lagern

11. ENTSORGUNG

Kann über zugelassene Entsorgungsunternehmen, die unter behördlicher Aufsicht stehen, zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sofern dabei die behördlichen Vorschriften erfüllt werden. Nur vollständig entleerte Verpackungen zur Verwertung geben.

12. MELDEPFLICHT

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt stehenden aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller umgehend zu melden.



Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

EU Responsible Person

Cobea GmbH
Rathausstraße 15/1/7
AT-1010 Wien

UK Responsible Person

Coltène/Whaledent Ltd.
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, RH15 9NF/UK

COLTENE International Dental Group

Customer Center

service@coltene.com

Made in Switzerland