

coltosol® F

Provisorisches Füllungsmaterial



**Mit uns können Sie rechnen:
Ökonomisch & zuverlässig**

coltène 
whaledent®


coltosol® F

Einfach in der Anwendung Zuverlässig in der Wirkung



Einfache Verarbeitung

- Cremige Konsistenz für einfache Adaption in der Kavität
- Gute Haftung in der Kavität
- Kein Anmischen, kein Materialverlust
- Selbständige Aushärtung durch Speichleinwirkung
- Einfaches Entfernen in grossen Teilstücken
- Lange Haltbarkeit

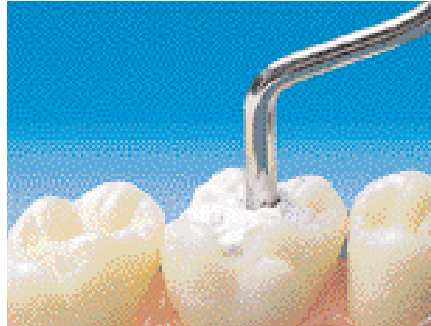

Zuverlässige Sicherheit

- Fluoridfreigabe
- Röntgenopazität zur Beurteilung des Behandlungsergebnisses
- Dichte Randqualität
- Eugenolfrei, keine Auswirkungen auf die Aushärtungen von Compositen
- Ideale Oberflächenhärte für provisorische Füllungen im Seitenzahnbereich und provisorische Wurzelkanalverschlüsse

Schnell gelegt.

Nachdem das gebrauchsfertige Coltosol® F mit den Fingerspitzen zu einem kompakten Kügelchen geformt ist, erfolgt die Applikation in die vorbereitete Kavität.

Einfach entfernt.

Coltosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Exkavator mühelos in grossen Teilstücken entfernen. Ohne Rückstände.

Ökonomisch: Aussergewöhnliche Leistung für Ihr Geld

Sie haben die Wahl.

Die benötigte Menge Coltosol® F wird entweder mit der Spritze dosiert oder mit dem Instrument direkt der Glasdose entnommen. In jedem Fall einfach, schnell und sauber.



Bestellinformation:

Coltosol® F in der Spritze:

5930 Coltosol® F

5 Spritzen à 8 g

Coltosol® F im Glasdöschen:

5906 Coltosol® F Single Pack

1 Döschen 38 g

5911 Coltosol® F Eco Pack

3 Döschen à 38 g

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Schweiz
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
750 Corporate Drive
Mahwah, New Jersey 07430/USA
Tel. +1 201 512 8000
Fax +1 201 529 2103
productinfo@coltenewhaledent.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de