

# HyFlex™ EDM

## Reduzierte Feilenanzahl

Der Einsatz von HyFlex™ EDM Feilen ermöglicht die Reduzierung der Feilenanzahl. In kleinen, geraden Kanälen kann die Verwendung der HyFlex™ OneFile ausreichen. Je nach klinischer Situation kann die Anzahl der verwendeten Feilen reduziert oder auch erweitert werden. HyFlex EDM Feilen können mit 400 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von 2,5 Ncm (25 mNm) verwendet werden. Die Gleitpfadfeilen sollten mit 300 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von 1,8 Ncm (18 mNm) eingesetzt werden.



	Optional Access Opening	Glidepath	Shaping	Optional Finishing
	 25/12 Orifice Opener	 Hand File 10/05 Glidepath File	 25/~ HyFlex OneFile	 40/04 50/03 60/02 Finishing Files
	 25/12 Orifice Opener	 Hand File 10/05 Glidepath File	 20/05 HyFlex EDM 25/~ HyFlex OneFile	 40/04 50/03 60/02 Finishing Files
	 25/12 Orifice Opener	 Hand File 15/03 Glidepath File 10/05 Glidepath File	 20/05 HyFlex EDM	

# Bestellinformation

HyFlex EDM Sets	21 mm	25 mm	
HyFlex EDM Shaping Set Simple 25/12; 10/05; 25/~	60022267	60019363	
HyFlex EDM Shaping Set Medium 10/05; 20/05; 25/~	60022277	60022278	
HyFlex EDM Shaping Set Max Curve 15/03; 10/05; 20/05	60023494	60023495	
HyFlex EDM Finishing Set 40/04; 50/03; 60/02	60022268	60019364	
HyFlex EDM Refills, 3 Feilen / Packung	15 mm	21 mm	25 mm
Hyflex EDM 25/12 Orifice Opener	60019596		
HyFlex EDM 15/03 Glidepath Feile	60023493	60023492	
HyFlex EDM 10/05 Glidepath Feile	60022269	60019594	
HyFlex EDM 20/05 Preparation Feile	60022275	60022276	
HyFlex EDM 25/~ OneFile	60022270	60019595	
HyFlex EDM 40/04 Finishing Feile	60022271	60019597	
HyFlex EDM 50/03 Finishing Feile	60022272	60019598	
HyFlex EDM 60/02 Finishing Feile	60022274	60019599	
HyFlex Zubehör			
Endo Practice Block; Packung mit 3 Acryl Blöcken	60011085		

Größe / Taper	HyFlex EDM Papierspitzen 100 Stk.	HyFlex EDM Guttaperchaspitzen 60 Stk.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Sortierung 20/05 - 60/02	60022744	60022705



Neues Anwendervideo zur  
sicheren und effizienten  
Wurzelkanalaufbereitung mit  
HyFlex™ EDM NiTi-Feilen. ▼



<https://bit.ly/2Fcg7cr>

**Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
T +41 71 757 5300  
F +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

**Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG**  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germany  
T +49 7345 805 0  
F +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com

 **COLTENE**