

Anlegen von Kofferdam und Desinfektion des Zahnes mit **CanalPro NaOCl 3%**

Spülen während der Aufbereitung mit **CanalPro NaOCl 3%** oder **6%**

Entfernung Schmierschicht nach Aufbereitung: 1 Min. Spülung mit **CanalPro EDTA 17%**

CanalPro NaOCl 3% oder 6% (mind. 10 ml 5 Min.)

Canal Pro CHX 2% (mind. 10 ml und 5 Min.)

CanalPro NaOCl 3% oder 6% (mind. 10 ml 5 Min.)

Neutralisierung von **NaOCl** mit 0,9%
NaCl Lösung/Alkohol

Spülung mit **CanalPro CHX 2%**
(mind. 10 ml und 5 Min.)

Trocknen mit **ROEKO / HyFlex Papierspitzen** und/oder **ROEKO Surgitip-endo**

Obturation mit **ROEKO GuttaFlow2 / bioseal**

Wichtig! Nach der Anwendung von **NaOCl** und vor der Anwendung von **CHX** muss der Wurzelkanal mittels einer Zwischenspülung (z.B. mit NaCl oder Alkohol) neutralisiert werden. **Hinweis:** Vor der Längenmessung mit Apexlokatoren wird meistens das Spülen mit NaCl empfohlen.

CanalPro™ SyringeFill Bestellinformationen



CanalPro™ SyringeFill	REF
CanalPro™ SyringeFill Station (1 x Flaschenträger inkl. Sockel, 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031347
CanalPro™ SyringeFill Holder (1 x Flaschenträger zur Wandmontage, 3 x CanalPro SyringeFill Cap)	60031348
CanalPro™ SyringeFill Cap (Deckel mit integriertem Luer-Lock)	60019662
CanalPro™ Spüllösungen	
CanalPro™ NaOCl 3%, 500 ml	60019655V
CanalPro™ NaOCl 6%, 500 ml	60019656V
CanalPro™ EDTA 17%, 500 ml	60019651
CanalPro™ EDTA 17%, 100 ml	60019654
CanalPro™ CHX 2%, 500 ml	60019658
CanalPro™ CHX 2%, 100 ml	60019659
CanalPro™ farbige Spritzen	
CanalPro™ farbige 5ml Spritzen rot, 50 Stk.	60019321
CanalPro™ farbige 5ml Spritzen blau, 50 Stk.	60019322
CanalPro™ farbige 5ml Spritzen gelb, 50 Stk.	60019323
CanalPro™ farbige 5ml Spritzen weiß, 50 Stk.	60019324
CanalPro™ farbige 10ml Spritzen rot, 50 Stk.	60011173
CanalPro™ farbige 10ml Spritzen blau, 50 Stk.	60011174
CanalPro™ farbige 10ml Spritzen gelb, 50 Stk.	60011175
CanalPro™ farbige 10 ml Spritzen weiß, 50 Stk.	60011176
Spülnadeln	
CanalPro™ Slotted-End Tips 27 ga, 100 Stk.	60011167
CanalPro™ Slotted-End Tips 30 ga, 100 Stk.	60011168
CanalPro™ Side-Port Tips 27 ga, 100 Stk.	60011169
CanalPro™ Side-Port Tips 30 ga, 100 Stk.	60011170