

Adhesive AC

Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts die Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

COLTENE Adhesive AC ist ein autoklavierbares Adhäsiv für Dentalabformmassen auf A-Silikonbasis. Es ist geeignet für Kunststoffabformlöffel aus Acrylaten, Polystyrol, Polycarbonaten.

ZWECKBESTIMMUNG

Eine dünne Schicht von COLTENE Adhesive AC dient zur Haftvermittlung zwischen Abformmaterial und Abformlöffel. Es verhindert das Loslösen des Abformmaterials vom Abformlöffel bei der Entnahme.

ZUSAMMENSETZUNG

Hauptbestandteile: Polydimethylsiloxan copolymer

INDIKATIONEN

- Keine direkte medizinische Indikation.
- Wird in Kombination mit Medizinprodukten verwendet.

KONTRAINDIKATIONEN

- Bei bekannten Allergien auf den Hauptbestandteil von COLTENE Adhesive AC ist auf eine Anwendung zu verzichten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden!
- Von offenen Flammen fernhalten!
- Immer mit Handschuhen arbeiten.
- Die Verwendung von COLTENE Adhesive AC darf ausschließlich von Fachpersonal wie Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachangestellten mit spezieller Qualifikation durchgeführt werden.
- Aufgrund der irreversiblen Verbindung zwischen additionsvernetzenden Silikonen und Kunststoffabformlöffel, sind die mit COLTENE Adhesive AC eingesprühten Kunststoffabformlöffel nach dem Abformen nicht mehr verwendbar.
- COLTENE Adhesive AC ist zur Verwendung mit Metall-Abformlöffeln und einigen Kunststoff-Abformlöffeln ungeeignet, im Zweifelsfall ist die Eignung zu prüfen.

NEBEN- UND WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt.

ANWENDER / PATIENTENGRUPPE

Das Produkt darf nur von entsprechend qualifizierten zahnmedizinischen Fachkräften verwendet werden. Für alle Patientengruppen geeignet, einschließlich Kinder, ältere Menschen sowie schwangere Frauen.

ANWENDUNG

Sauberen und trockenen Kunststoffabformlöffel aus kurzer Distanz mit einer möglichst dünnen, gleichmäßigen Schicht COLTENE Adhesive AC besprühen (2 – 3 Hübe) und mindestens 1 Minute trocknen lassen oder mit Druckluft trocken blasen.

AUFBEREITUNG, REINIGUNG, DESINFEKTION UND PFLEGE

Löffelreinigung

Eine Löffelreinigung ist für Einweg-Abformlöffel nicht vorgesehen.

HALTBARKEIT / LAGERUNG

COLTENE Adhesive AC erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist, bei gut verschlossener Flasche, 15-23 °C / 59-73 °F und 50 % relativer Feuchte. Haltbarkeit nach erster Öffnung 3 Monate.

ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

MELDEPFLICHT

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt stehenden aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde umgehend zu melden.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Einatmens, Verschluckens, Kontakts mit den Augen oder ähnlicher Vorfälle ist sofort ärztliche Hilfe hinzuzuziehen, um potenzielle Schäden zu mindern.

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com



Glossary	
	Consult instructions for use
	Keep away from sun light
	Temperature limitation
	Marking of Conformity Europe
	Identification for Ukraine
	Legal Manufacturer
	Expiry Date
	Batch Code
	Rx only
	Medical Device
	Manufacturing Date
	Unique Device Identifier
	European Authorized Representative
	Importer
	Reference Number

COLTENE International Dental Group

Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Made in Switzerland by
Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

Customer Center
service@coltene.com

COLTENE