

# Adhesive

## Gebrauchsinformation

DE

Lesen Sie vor der Anwendung des Produkts die Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

COLTENE Adhesive ist ein Universal-Adhäsiv für Dentalabformmassen auf Silikonbasis (A- und C-Silikone). Es kann für sämtliche herkömmliche Abformlöffel (z.B. Metall) verwendet werden.

### ZWECKBESTIMMUNG

Eine dünne Schicht von COLTENE Adhesive dient zur Haftvermittlung zwischen Abformmaterial und Abformlöffel. Es verhindert das Loslösen des Abformmaterials vom Abformlöffel bei der Entnahme.

### ZUSAMMENSETZUNG

Hauptbestandteile: Polysiloxan

### INDIKATIONEN

- Keine direkte medizinische Indikation.
- Wird in Kombination mit Medizinprodukten verwendet.

### KONTRAINDIKATIONEN

- Bei bekannten Allergien auf die Hauptbestandteile von COLTENE Adhesive ist auf eine Anwendung zu verzichten.

### SICHERHEITSHINWEISE

- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden!
- Von offenen Flammen fernhalten!
- Immer mit Handschuhen arbeiten.
- Flasche nach Gebrauch sofort schließen!
- Die Verwendung von COLTENE Adhesive darf ausschließlich von Fachpersonal wie Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachangestellten mit spezieller Qualifikation durchgeführt werden.

### NEBEN- UND WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt.

### ANWENDER / PATIENTENGRUPPE

Das Produkt darf nur von entsprechend qualifizierten zahnmedizinischen Fachkräften verwendet werden. Für alle Patientengruppen geeignet, einschließlich Kinder, ältere Menschen sowie schwangere Frauen.

### ANWENDUNG

Sauberen und trockenen Abformlöffel mit einer möglichst dünnen Schicht COLTENE Adhesive bestreichen und mind. 1 Min trocknen lassen oder mit Druckluft trocken blasen.

Flasche nach Gebrauch sofort schließen!

### AUFBEREITUNG, REINIGUNG, DESINFEKTION UND PFLEGE

#### Löffelreinigung

Ausgehärtetes Abformmaterial kann mit einem stumpfen Instrument entfernt werden. Durch Einlegen in handelsübliche Universal-Lösungsmittel oder Leichtbenzin löst sich das COLTENE Adhesive auf. Lösungsmittel sollten nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Löffel wie üblich reinigen und desinfizieren.

### HALTBARKEIT / LAGERUNG

COLTENE Adhesive erfüllt den vorgesehenen Zweck mindestens bis zum Verfalldatum, das auf den Behältnissen aufgeführt ist, bei gut verschlossener Flasche, 15-23 °C / 59-73 °F und 50 % relativer Feuchte. Haltbarkeit nach erster Öffnung 3 Monate.

### ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache

mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

### MELDEPFLICHT

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt stehenden aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde umgehend zu melden.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Einatmens, Verschluckens, Kontakts mit den Augen oder ähnlicher Vorfälle ist sofort ärztliche Hilfe hinzuzuziehen, um potenzielle Schäden zu mindern.

SAFETY DATA SHEET  
www.coltene.com



Glossary	
	Consult instructions for use
	Keep away from sun light
	Temperature limitation
	Marking of Conformity Europe
	Identification for Ukraine
	Legal Manufacturer
	Expiry Date
	Batch Code
	RX only
	Medical Device
	Manufacturing Date
	Unique Device Identifier
	European Authorized Representative
	Importer
	Reference Number

#### COLTENE International Dental Group

Dent4You AG  
Bahnhofstrasse 2  
CH-9435 Heerbrugg

Made in Switzerland by  
Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten

Customer Center  
service@coltene.com