

roeko Gelatamp

Instrucciones de uso

ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Consérvelas para su posterior consulta.

1. CARACTERÍSTICAS

Gelatamp (14 × 7 × 7 mm) es una esponja de gelatina de efecto hemostático con aditamento del 5% de plata coloidal. Gelatamp está previsto para la absorción de la sangre y la estabilización del coágulo a fin de favorecer la hemostasia y prevenir las complicaciones inflamatorias después de la extracción dental. En combinación con la plata coloidal, evita la alteración de la cicatrización de la herida e inhibe su colonización microbiana.

2. COMPOSICIÓN

10 mg de Gelatamp contienen:

Gelatina endurecida Ph. Eur. 9,5 mg
Plata coloidal Ph. Eur. 0,5 mg

3. INDICACIÓN

Cavidades de la herida con hemorragia después de la extracción dental.

4. INDICACIONES DE USO

Gelatamp es extraído del envase en condiciones asépticas una vez retirado el sello de aluminio y está inmediatamente listo para su uso. En caso necesario, el tamaño de la esponjilla se puede adaptar a la cavidad quirúrgica sin ejercer presión.

En heridas más grandes también se pueden utilizar dos cubos de Gelatamp.

La esponjilla seca y no comprimida es colocada inmediatamente después de la intervención quirúrgica en la cavidad fresca y llena de sangre, en donde debe llenarse completamente con sangre (control visual). Para no impedir la epitelización deseada, la esponja no debe sobrepasar el borde gingival interno. Así el alvéolo queda definitivamente tratado y no debe ser enjuagado nuevamente.

5. ESTERILIDAD

Gelatamp es esterilizado por radiación gama. En paquetes no dañados y cerrados la esterilidad queda garantizada hasta su primera aplicación. Antes de usar los instrumentos, deseche los envases que estén dañados.

6. CONTRAINDICACIONES

Heridas infectadas, purulentas y supurantes, hipersensibilidad a la plata o a la gelatina.

7. REACCIONES SECUNDARIAS

Pueden surgir desajustes restitutivos en aplicación inapropiada, sobre todo en áreas alveolares contaminadas.

8. INTERACCIONES CON OTRAS SUBSTANCIAS

La aplicación simultánea de pastas alveolares, conos de cicatrización u otros preparados así como una humidificación con materiales líquidos o medicamentos, como tensioactivos aniónicos, antisépticos con contenido de fenol, lactatos de etacridina, ácidos minerales diluidos y soluciones salinas concentradas puede impedir la restitución de la herida y por lo tanto debe ser evitada. Hay que descartar un contacto con hidrógeno peróxido debido a que se puede desteñir la esponja.

9. INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Gelatamp tiene propiedades de absorción de humedad, por lo tanto debe almacenarse en un lugar seco. El envase deberá guardarse cerrado para proteger el producto de la luz. Mantenga los dispositivos sanitarios fuera del alcance de los niños.

Gelatamp tiene una vida útil de 3 años. Cerrado puede ser utilizado hasta la fecha de vencimiento. Una vez abierto utilizar en un plazo de cuatro semanas. No utilizar después de la fecha de vencimiento que se encuentra sobre el empaque y la etiqueta. Las esponjillas no utilizadas se pueden desechar sin ningún problema con los demás desechos biológicos; el bote de plástico, la tapa y el aluminio se pueden reciclar.














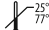




10. PRESENTACIÓN

20 esponjas REF 274002

50 esponjas REF 274007



Glossary

-  Consult instructions for use
-  Medical Device
-  Legal Manufacturer
-  Catalogue Number
-  Manufacturing Date
-  Expiry Date
-  Batch Code
-  Single use only
-  Sterilized using irradiation
-  Single sterile barrier system
-  Do not use if package is damaged
-  Keep dry
-  Keep away from sun light
-  Temperature limitation
-  Bio material / Animal origin
-  Medical substance
-  Swiss representative
-  Conformity mark Russia

Coltene/Whaledent
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

COLTENE