

SISTEMA DE LIMAS EDM NITI



HyFlex EDM – secuencia OGSF
Tome el control en sus manos

 **COLTENE**

HyFlex EDM

Limas extraordinariamente resistentes a la fractura para un tratamiento más seguro

Las limas HyFlex EDM tienen una superficie exclusiva y destacan por su durabilidad y su alta resistencia a la fractura. Esto se consigue gracias a un innovador proceso de fabricación utilizando «Electric Discharge Machining» (EDM). Además, las limas HyFlex están fabricadas de aleación de níquel titanio con el tratamiento térmico Controlled Memory (CM).

La combinación totalmente única de flexibilidad y resistencia a la rotura permite reducir el número de limas HyFlex EDM necesarias para la limpieza y la conformación durante las endoncias, sin comprometer la conservación de la anatomía del canal radicular.

Regenerables de manera segura múltiples veces

El restablecimiento del comportamiento permite el control visual después del autoclavado y el uso múltiple.

✓ Lista para la reutilización segura



✗ Deformada (descartar)



«Con una sola secuencia es posible tratar prácticamente todos los casos clínicos, tanto con anatomías del conducto radicular sencillas como complejas. Las dimensiones de las limas (tamaño de la punta y cono) están perfectamente adaptadas. Tengo todo bajo control, y el éxito es previsible».



Prof. Dr. Eugenio Pedullà
Universidad de Catania, Italia

«Con solo unos picoteos llego hasta la longitud de trabajo medida, sin paradas intermedias. Antes era necesario introducir la lima varias veces en el conducto radicular. ¡Ahora ya no hace falta! La secuencia OGSF puede aplicarse sin esfuerzo incluso en los casos complejos».



Dr. Thomas Rieger
Endodoncista, Memmingen, Alemania

HyFlex EDM OGSF Shaper




Preesterilizadas

Uso inmediato



Excelente resistencia a la fractura

Tratamiento seguro gracias a la exclusiva superficie endurecida

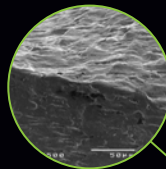


Potente rendimiento de corte

Permite una preparación rápida con un menor número de limas



Muy flexibles y precurvables

La preparación uniforme y centrada reduce el riesgo de escalón o perforación gracias al efecto de memoria controlado

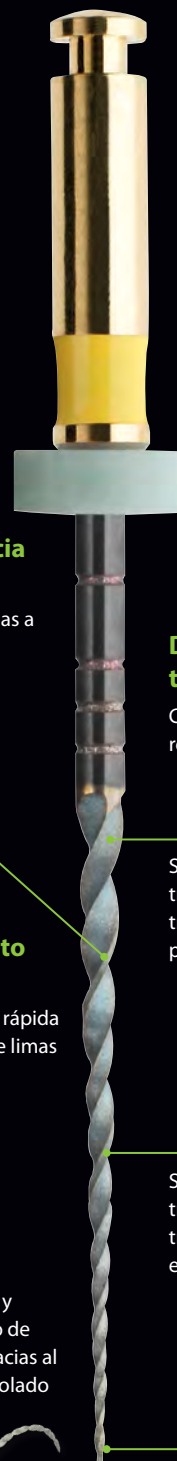

Diseño de sección transversal variable

Contribuye a una elevada resistencia a la rotura

Sección transversal triangular en la parte superior

Sección transversal trapezoidal en el medio

Sección transversal cuadrada en la punta



Secuencia OGSF

Las nuevas limas HyFlex EDM – diseñadas para el uso como secuencia

Opener

Glider

Shaper

Finisher

¿Ha dicho rapidez y seguridad?

¡Descubra la nueva solución de secuencia!

El sistema de limas HyFlex EDM ofrece una solución a medida para la preparación rápida y fiable de los casos diarios. La evidencia demuestra que al aplicar listas de comprobación y seguir protocolos normalizados se consiguen una reproducibilidad y una seguridad mayores. Basándose en este conocimiento, COLTENE ofrece las nuevas limas HyFlex EDM diseñadas para el uso en secuencia con un protocolo claro y sencillo para conseguir una curva de aprendizaje corta y un tratamiento simplificado.

La nueva secuencia HyFlex EDM OGSF incluye una lima Opener y una lima Glider para abrir la vía de deslizamiento, así como una lima Shaper para dar forma al conducto radicular en toda su longitud.

La secuencia OGSF se ha desarrollado en colaboración con el Prof. Eugenio Pedullà y proporciona una sensación de uniformidad cuando se pasa de una lima a otra gracias a la adaptación optimizada de la punta y el cono.

En general, podrá alcanzar la longitud de trabajo con solo unos cuantos toques usando movimientos de golpeteo. Esto significa menos

Ventajas

- **Resultados previsibles** aplicando el protocolo normalizado OGSF
- **Preparación rápida de los casos diarios** gracias a la adaptación optimizada de la punta y el cono en toda la secuencia
- **Mayor seguridad para el paciente** gracias a la elevada resistencia a la fractura del material y al seguimiento del protocolo normalizado OGSF



— Longitud de trabajo

Información para pedidos

Conformación

Juego HyFlex EDM OGSF, 4 uu.	21 mm	25 mm	
Secuencia OGSF	60036141	60036142	
Reposiciones de limas HyFlex EDM OGSF, 3 uu.	18 mm	21 mm	25 mm
Lima de abertura 18/.11	60036140	-	-
Lima Glidepath 15/.03	-	60023493	60023492
Lima de conformación 18/.045	-	60036136	60036137
Lima de acabado 30/.04	-	60036138	60036139
Lima de acabado HyFlex EDM, 3 uu.	21 mm	25 mm	
Lima de acabado 40/.04	60022271	60019597	
Lima de acabado 50/.03	60022272	60019598	
Lima de acabado 60/.02	60022274	60019599	

Secado y obturación

Tamaño/conicidad	HyFlex EDM Puntas de papel, 100 uu.	HyFlex EDM Puntas de gutapercha, 60 uu.
30/.04	60036503	60036504
40/.04	60022676	60022708
50/.03	60022741	60022709
60/.02	60022740	60022710



Opener



Shaper



Glider



Finisher

Su guía Endo

Práctica. Innovadora. Guiando el camino.

COLTENE proporciona soluciones sencillas, seguras y eficientes para todos los pasos del tratamiento endodóntico, y guía cuidadosamente al dentista paso a paso en cualquier situación endodóntica con formación específica y asesores experimentados en el ámbito de la endodoncia.

Nuestra gama de productos, desarrollada a lo largo de décadas, incluye consumibles innovadores y equipos sofisticados que cubren de manera fiable los cinco pasos del tratamiento.



Control de infecciones



Limpieza y conformación



Irrigación y secado



Obturación



Restauración

© COLTENE – www.coltene.com

Pie de imprenta/editor

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U
c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
ES-28220 Majadahonda,
Madrid
+34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Centro de servicios

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UJFN)
Lunes - viernes De 8:00 a 17:00 CEST

COLTENE