

Adhesive AC

Información para el uso

ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Descripción del producto

Coltène Adhesive AC es un adhesivo autoclavable aplicable en aerosol para la adhesión permanente entre siliconas polimerizadas por adición y cubetas de impresión de plástico hechas de acrilatos, poliestireno o policarbonatos.

Uso previsto

Una fina capa de COLTENE Adhesive AC sirve de adhesivo entre el material de impresión y la cubeta. Previene la separación del material de impresión de la cubeta durante la remoción.

Composición

Componente principal: copolímero de polidimetilsiloxano

Indicaciones

Uso en combinación con productos sanitarios.

Contraindicaciones

- No usar en caso de alergias conocidas al ingrediente principal de COLTENE Adhesive AC.
- COLTENE Adhesive AC no es compatible con el uso de cubetas metálicas o cubetas de impresión especiales de plástico. En caso de duda, compruebe la aceptabilidad.

Información de seguridad

⚠ PELIGRO

- H225 Líquido y vapores muy inflamables.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337+P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



GHS02 GHS07

⚠ ADVERTENCIA

Contiene acetato de etilo.
Utilizar solo en lugares bien ventilados.
Mantener lejos de las fuentes de ignición.
Usar siempre guantes.

Solo debe utilizar COLTENE Adhesive AC el personal especializado, como dentistas y auxiliares dentales con formación específica.

NOTA

Debido a que la cementación entre las siliconas polimerizadas por adición y las cubetas de impresión de plástico es irreversible, las cubetas de plástico rociadas con COLTENE Adhesive AC después de tomar la impresión no pueden volver a utilizarse.

Efectos secundarios/interacciones

No se conocen reacciones perjudiciales ni efectos secundarios en pacientes o para el personal de la clínica.

Usuarios/grupos de pacientes

El producto solo debe ser aplicado por profesionales dentales. Es adecuado para todos los grupos de pacientes.

USO ADECUADO

Rocíe (2-3 veces) todas las cubetas de impresión de plástico desde una distancia cercana, dejando una capa fina y homogénea de Coltène Adhesive AC, y deje secar durante al menos 1 minuto o seque con aire comprimido.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpiieza de las cubetas

Las cubetas de impresión de plástico desechables no deben limpiarse.

Conservación y almacenamiento

COLTENE Adhesive AC cumple la finalidad prevista al menos hasta la fecha de caducidad indicada en los recipientes, en frascos bien cerrados, a una temperatura de 15 a 23 °C/de 59 a 73 °F y con un 50 % de humedad relativa. Una vez abierto, consumir en tres meses.

Eliminación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Puede ser incinerado conjuntamente con los desechos caseros en cumplimiento con las regulaciones oficiales que están en relación con compañías de recolección de basura legalmente aprobadas y con las autoridades a cargo.

Obligación de notificación

Todos los incidentes graves ocurridos en relación con este producto deberán notificarse de inmediato al fabricante, así como a las autoridades competentes.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Exclamation Mark



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 COLTENE