


MÁSCARA GINGIVAL ESCANEABLE



GI-MASK® 3D

Digitalice y visualice

 **COLTENE**

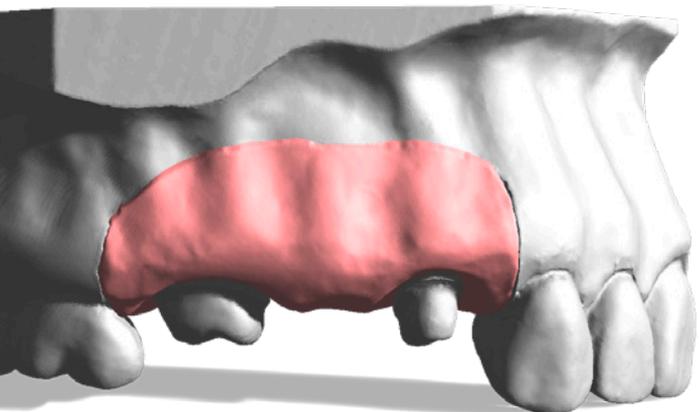


Digitalice y visualice

La máscara escaneable GI-MASK 3D permite digitalizar los perfiles gingivales reproducidos en la zona de preparación sin necesidad de aplicar un espray de escaneado.

- Escaneable sin un tratamiento de la superficie
- Excelente fluidez
- Elevada elasticidad y resistencia al desgarre

Reproducción completa de la situación periodontal

El uso de una máscara gingival es especialmente importante durante la fabricación de supraestructuras soportadas por implante para conseguir que las prótesis se ajusten a la perfección. GI-MASK 3D es una silicona A de alta precisión con una fluidez excepcional que permite el flujo uniforme alrededor de los pernos montados en la impresión y, por tanto, garantizan una completa reproducción de la situación periodontal.

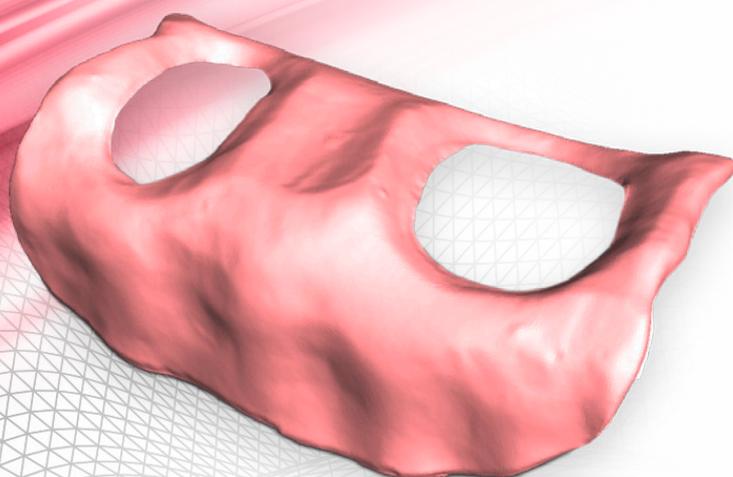

Ultraelástico, resistente al desgarro y de fácil manipulación

GI-MASK 3D es una máscara gingival flexible para implantes dentales y modelos maestros. La máscara gingival debe permitir el procesamiento flexible durante el trabajo en el modelo. GI-MASK 3D se caracteriza por su elevada elasticidad y su resistencia al desgarro. No obstante, se puede procesar muy bien con una fresa recortadora

para silicona. Las propiedades de escaneo de GI-MASK 3D permiten que el material se digitalice por completo con escáneres convencionales sin necesidad de utilizar polvos. Por este motivo, GI-MASK 3D es un importante eslabón en el proceso CAD/CAM para fabricar prótesis.

Técnica directa



Aislamiento de la impresión con GI-MASK Universal Separator



Aplicación de GI-MASK 3D directamente en la impresión



Buena consistencia tixotrópica



Vaciado de la impresión con escayola ultradura



Modelo acabado con GI-MASK 3D



Escaneado del modelo con el escáner

Técnica indirecta



Modelo de trabajo con una llave de silicona de COLTENE Lab Putty




Aislamiento de la llave de silicona con GI-MASK Universal Separator




Inyección de GI-MASK 3D



Modelo acabado con GI-MASK 3D

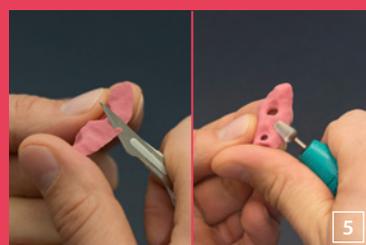

Fácil tallado y repaso

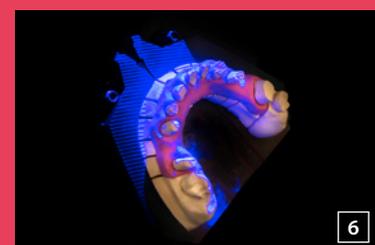

Escaneado del modelo con ayuda del escáner

Información para pedidos



60022250 Kit de iniciación GI-MASK 3D
2 × Cartuchos de 50 ml
1 × Universal Separator, 50 ml
1 × 12 puntas de mezcla universales
1 × 12 Oral Tips
1 × Fresa recortadora para siliconas

60022251 Reposición DE GI-MASK 3D
2 × Cartuchos de 50 ml
1 × 12 puntas de mezcla universales
1 × 12 Oral Tips



© 2018 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid/Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Suiza
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/EE. UU.
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**