

One Coat **Bond SL**

Instrucciones de uso

ES

Definición

One Coat Bond SL es un agente adhesivo monocomponente, multifuncional y fotopolimerizable para la técnica de restauración adhesiva.

Composición

Metacrilatos
Fotoiniciadores
Polialquenoato metacrilizado

Indicaciones

One Coat Bond SL está indicado para:

- Obturaciones directas con composite y compómero
- Adhesión de restauraciones indirectas (inlays, onlays, carillas y coronas) fabricadas de cerámica o composite
- Adhesión de composite a cerámica, composite, metal y amalgama
- Sellado de la dentina

Contraindicaciones

Hipersensibilidad probada a los ingredientes contenidos en One Coat Bond SL.

Higiene oral inadecuada.

Si resulta imposible mantener seca la zona de trabajo.

Efectos secundarios

Los ingredientes de One Coat Bond SL pueden causar sensibilidad en las personas con predisposición a ello.

Interacciones

Evitar el uso de los materiales que contengan fenoles y otras sustancias inhibidoras de la polimerización (p. ej. óxido de zinc-eugenol) en combinación con One Coat Bond SL.

Aplicaciones

- **Obturaciones directas**
- **Adhesión de inlays, onlays, carillas y coronas**
- **Adhesión a otros materiales**

1. Preparación de cavidades

Según el principio de la técnica de restauración adhesiva.

Para proteger la pulpa se debe aplicar cerca de ella una pequeña cantidad de cementos de hidróxido de calcio de fraguado duro. Acabe nuevamente el esmalte con una fresa de diamante.

Para el aislamiento se recomienda el uso de un dique de goma (p. ej., de HYGENIC/ROE-KO).

2. Acondicionamiento

Aplique un gel grabador a base de ácido fosfórico (p. ej., Etchant Gel S) sobre el esmalte y la dentina de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. Después aclare abundantemente con agua hasta asegurarse de

se han eliminado todos los restos. Seque la cavidad con aire sin aceite.

Importante: no deseque la dentina.

3. Aplicación

Dispense una gota de One Coat Bond SL en el pocillo de mezcla y aplíquelo en la cavidad con un pincel desechable. Frote la superficie durante 20 s y séquela con cuidado con aire sin aceite. Fotopolimerice durante 30 s (lámpara de polimerización halógena o LED con una intensidad de luz $\geq 800 \text{ mW/cm}^2$). Con una intensidad lumínica menor, la fotopolimerización se prolonga proporcionalmente.

Nota: evite la acumulación de los adhesivos. Esto puede influir negativamente en la precisión del ajuste.

4. Composite, compómero y otros materiales

Procedimiento según las instrucciones de uso del fabricante.

Importante: para usar One Coat Bond SL es preciso garantizar una penetración suficiente de luz incidente en toda la restauración. Siguiendo las especificaciones del fabricante.

Medidas de emergencia, síntomas, antídotos

Si el producto entra en contacto directo con la mucosa oral, aclare con agua. En caso de contacto con los ojos, aclare con agua abundante. Acuda al médico para su evaluación y posterior tratamiento.

Notas

Solo debe suministrarse a dentistas y técnicos dentales o bajo su prescripción.

¡Manténgase fuera del alcance de los niños!
Deseche únicamente los envases totalmente vacíos.

Vida útil y etiquetado

La fecha de caducidad y el número del  se encuentran en los envases y en el empaque exterior.

No utilice el producto después de su fecha de caducidad.

Almacenamiento

Conservar a 4–23 °C / 39–73 °F.

No exponga el producto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

Consejos de higiene

Se recomiendan las siguientes instrucciones para unas condiciones de higiene óptimas para el uso de One Coat Bond SL:

- Los pinceles desechables deben utilizarse en un único paciente.
- Cierre los frascos inmediatamente después de su uso. Limpie con desinfectantes habituales.

For SDS contact
msds@coltene.com



0123



UA TR 120

Glossary	
	Consult instructions for use
	Keep away from sun light
	Temperature limitation
	Marking of Conformity Europe
	Identification for Russia
	Identification for Ukraine
	Legal Manufacturer
	Expiry Date
	Reference Number

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**