

SISTEMA DE CARILLAS DE COMPOSITE DIRECTAS

BRILLIANT COMPONEER®

Para una sonrisa brillante





BRILLIANT COMPONEER® Para una sonrisa brillante

Restauraciones anteriores estéticas en una sola sesión

BRILLIANT COMPONEER son carillas de composite prefabricadas para la restauración estética en el sector anterior. Este avanzado sistema reúne las ventajas de la restauración directa con las de la técnica de carillas indirectas. De este modo, las correcciones de dientes unitarios son tan sencillas

y eficaces de realizar como las restauraciones del sector anterior completo. Las carillas están disponibles en diferentes tamaños y tonalidades de esmaltes, y se pueden personalizar fácilmente. Para el paciente esto significa que puede conseguir una sonrisa brillante en solo una sesión.

Composite brillante

Las carillas de esmalte están basadas en la tecnología de relleno submicrónico consolidada BRILLIANT EverGlow, y su fabricación es industrial. Gracias a la refinada composición con rellenos especiales, el material destaca por una elevada conservación del brillo.

Además, las carillas deslumbran por su extraordinaria estabilidad a pesar de un grosor de solo 0,3 mm. La superficie marcadamente lisa de BRILLIANT COMPONEER se puede pulir al alto brillo al instante.



Cementación en un sencillo paso

Para cementar BRILLIANT COMPONEER solo es necesario aplicar una capa del composite universal BRILLIANT EverGlow. El empleo del mismo material de base permite conseguir una unión firme y homogénea: el fundamento perfecto para una restauración fiable. La suave textura y la excelente humectabilidad de BRILLIANT EverGlow aseguran

una cómoda manipulación de BRILLIANT COMPONEER. El sistema lo completan un adhesivo perfectamente adaptado y unos instrumentos de ayuda muy prácticos para la colocación y la modelación de las carillas.

- Restauraciones anteriores estéticas de alta calidad
- Restauración mínimamente invasiva con composite
- Solo una sesión; sin necesidad del laboratorio
- Brillo duradero gracias a un excelente pulido
- Alta rentabilidad para la consulta y el paciente

Dos tonalidades de esmalte para una caracterización personalizada

BRILLIANT COMPONEER
Bleach Translucent




BRILLIANT COMPONEER
Translucent



Brillo duradero, respetuoso con la sustancia dental

Preparación mínimamente invasiva

El exclusivo proceso de fabricación de BRILLIANT COMPONEER permite realizar grosores de capa extremadamente finos a partir de 0,3 mm. Esto hace posible una preparación mínimamente invasiva respetuosa con la sustancia dental existente. Al mismo tiempo, las carillas de composite fabricadas industrialmente poseen una homogeneidad y una estabilidad excelentes.

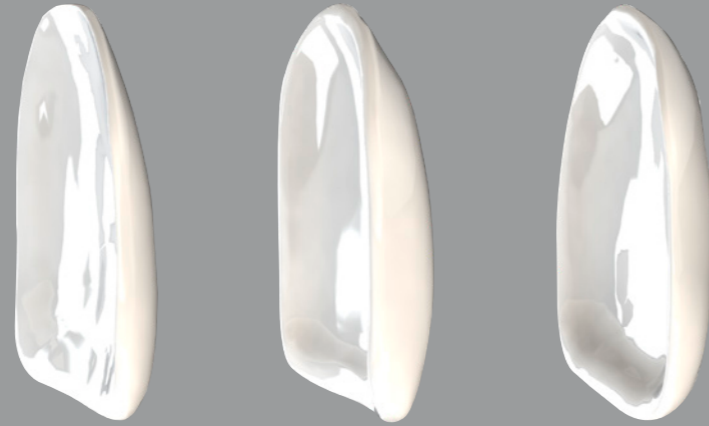

BRILLIANT COMPONEER

Producto de la competencia A

Producto de la competencia B

Fuente: mediciones de Units IM-TECHNOLOGY AG, Schweiz

Excelente capacidad de integración


Todos los productos de la serie de composite BRILLIANT destacan por su excelente integración en la boca. Esto permite usar las carillas Componeer sin que se noten. La selección del tono adecuado a través del composite de cementación BRILLIANT EverGlow es también muy

sencilla gracias al práctico concepto cromático «Duo Shade» con colores dobles, como A1/B1 o A2/B2. Además el incremento del grosor de las carillas translúcidas hacia el margen incisal permite conseguir una transición cromática natural.

Brillo y solidez de color duraderos

Como empresa pionera en el tratamiento con obturaciones estéticas, COLTENE es conocida por sus soluciones innovadoras desarrolladas desde la práctica. Las carillas BRILLIANT COMPONEER son sometidas a una polimerización previa en un proceso de producción expresamente desarrollado. Gracias a la inteligente composición del relleno, las carillas de composite poseen una superficie extraordinariamente sedosa. Además, destacan por su marcado brillo y por la solidez de su color. ¡El resultado es una visión siempre bonita!

Una comparación realizada en el simulador del cepillo de dientes entre la serie COMPONEER clásica y BRILLIANT COMPONEER demuestra una conservación del brillo mejorada bajo una carga continua intensiva con más de 20.000 movimientos de cepillado.

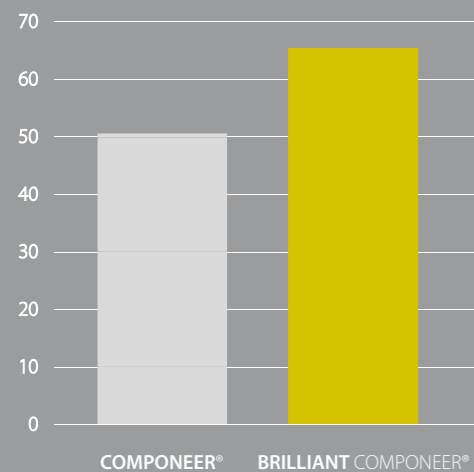

Fuente: datos internos

Excelente adhesión gracias a la microrretención

La exclusiva superficie interior microrretentiva de BRILLIANT COMPONEER incrementa notablemente la humectabilidad de las carillas de composite con el adhesivo. De este modo se consigue una mayor adhesión que, por ejemplo, con las carillas de cerámica habituales.




Durabilidad gracias a una elasticidad similar a la de la dentina

En las situaciones de carga se producen altas fuerzas de tracción en la interfase adhesiva entre el diente y el material restaurador. Gracias al módulo de elasticidad de BRILLIANT COMPONEER similar al de la dentina, las tensiones son mínimas. De este modo se evitan las fisuras, las

grietas y los descascarillamientos: una buena base para unas restauraciones duraderas.

Módulo de elasticidad: 9.8 GPa
Resistencia a la flexión 125 MPa

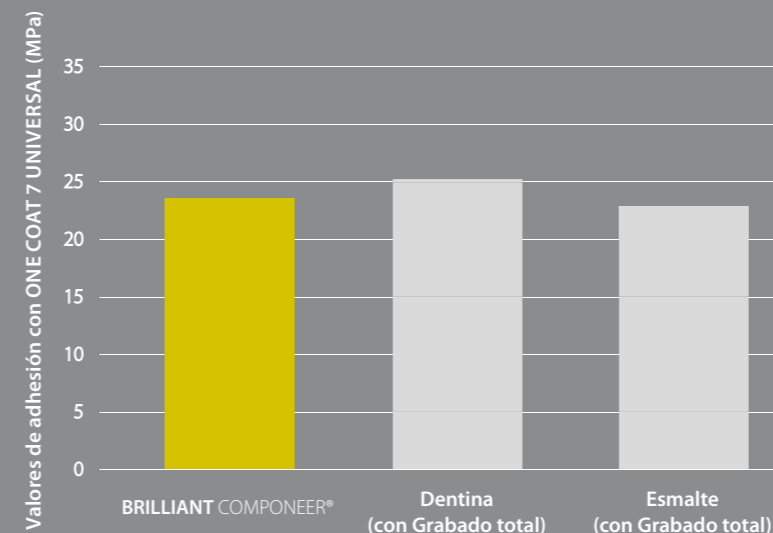

Fuente: datos internos

Adhesión segura a la sustancia dental

ONE COAT 7 UNIVERSAL es perfecto para la adhesión de BRILLIANT COMPONEER. Este adhesivo de un solo componente fotopolimerizable se puede utilizar con todas las técnicas habituales: tanto con la técnica autograbante, como con la de grabado selectivo o con la del grabado total, ONE COAT 7 UNIVERSAL posee unos valores de adhesión extraordinarios en todas las situaciones.

Un plus para sus pacientes...

Los pacientes bien informados saben lo que quieren

Una sonrisa brillante y segura de sí misma abre puertas, tanto en el trabajo como en la vida privada. Sus pacientes desean brillar en su vida y mejorar continuamente su aspecto. Las pequeñas correcciones deben

poder hacerse de manera rápida y sencilla, sin necesidad de paradas innecesarias en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, un cliente bien informado espera una relación precio calidad atractiva.



Las carillas BRILLIANT COMPONEER convencen a los pacientes exigentes por:

- Resultados estéticos
- Alta conservación del brillo y durabilidad
- Buena calidad a buen precio
- Solución rápida en solo una sesión
- Preparación mínimamente invasiva respetuosa con la sustancia dental
- Sin laboratorio, sin toma de impresión y sin incómodos provisionales

... y para su consulta

Las consultas dentales modernas destacan por unos tratamientos innovadores

Usted dirige su consulta de manera rentable y conforme a las normas profesionales más actuales. Con ofertas de tratamiento innovadoras, usted entusiasma a sus pacientes y se sitúa por

delante de la competencia. Sus clientes valoran su asesoramiento competente para un tratamiento óptimo y agradecen unas soluciones atractivas y a medida.

Su consulta dental también se beneficia del sistema de carillas de composite directas:

- Resultados duraderos y estéticos
- Eficaz en comparación con las restauraciones de composite directas
- Técnica mínimamente invasiva en comparación con la de las carillas indirectas
- Alta rentabilidad en el uso diario
- Sin toma de impresión, sin laboratorio
- Sistema de composite con componentes óptimamente adaptados entre sí
- Multitud de posibilidades de uso en una serie de indicaciones clásicas
 - Restauración y recubrimiento de defectos por caries
 - Recubrimiento de restauraciones antiguas
 - Reconstrucción de la sustancia dental perdida
 - Restauración de fracturas dentales
 - Prolongaciones del borde incisal
 - Correcciones cosméticas de pigmentaciones y malposiciones dentales
 - Corrección de malformaciones anatómicas
 - Cierre del diastema



«Mis pacientes adoran su nueva sonrisa. A menudo se sorprenden de que el dentista pueda ofrecer soluciones de alta calidad rápidas y de bajo coste. En el aspecto económico, con BRILLIANT COMPONEER puedo calcular yo mismo todos los costes, sin el laboratorio ni otros intermediarios.»


Dent. Mario Besek, Suiza

BRILLIANT COMPONEER®

Éxito en solo unos pasos



1 La situación inicial: dientes anteriores con restauraciones viejas y decoloradas

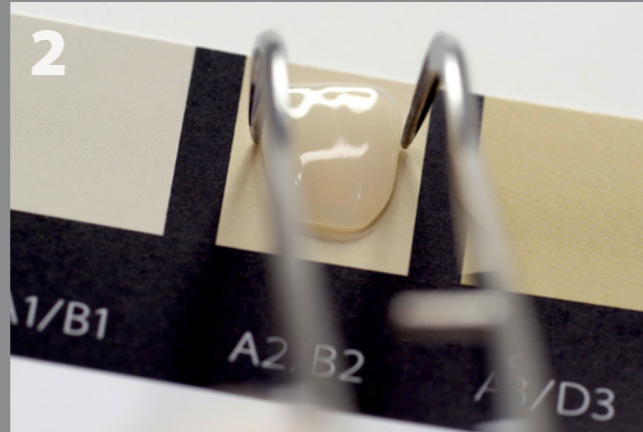


2 Selección del tono: la guía de color Shade Guide permite seleccionar el tono de la carilla BRILLIANT COMPONEER y el material de cementación.



3 Amplia selección: después de la preparación se determina el tamaño adecuado usando la guía ContourGuide transparente.



4 Adhesión: aplicación de ONE COAT 7 UNIVERSAL después de utilizar la técnica del grabado total.

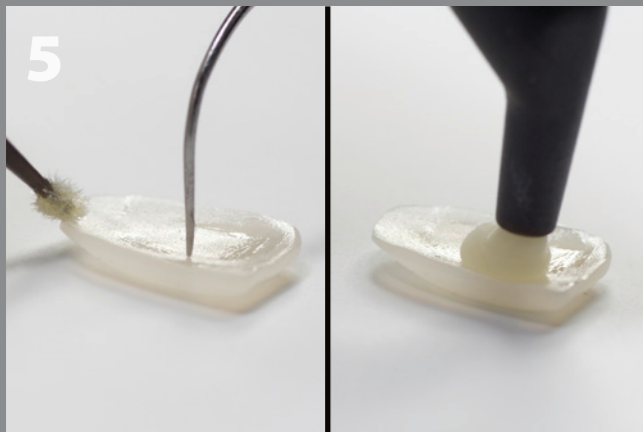

5 Preparación: se aplican ONE COAT 7 UNIVERSAL y BRILLIANT EverGlow para la cementación.



6 Colocación: BRILLIANT COMPONEER se coloca sobre el diente y se polimeriza.



7 Pulido: un breve pulido incrementa aún más el brillo inherente del material.



8 El resultado: una sonrisa brillante dos semanas después del tratamiento.

CONSEJO

Consejo práctico: tan individuales como sus pacientes

Las carillas BRILLIANT COMPONEER se pueden personalizar fácilmente. La forma básica anatómica se puede modificar con un disco para adaptarla a cada paciente, y la textura superficial labial se puede acentuar con un diamante de grano fino.



VER EL VÍDEO COMPLETO



www.componeer.info

CONSEJO

Consejo práctico: reparación sencilla

Como sucede con todas las restauraciones de composite es posible realizar pequeñas correcciones en todo momento: como BRILLIANT COMPONEER y BRILLIANT EverGlow están basados en el mismo composite, las carillas se puede fijar y reparar con este composite universal.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Sets BRILLIANT COMPONEER

Contenido	REF									
	Bleach Translucent ¹				Translucent ²					
	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	XL
Set BRILLIANT COMPONEER Maxilar Superior	6 uds.	11, 12, 13, 21, 22, 23	60023198	60023200	60023201	60023203	60023204	60023206	60023207	60023209
Set BRILLIANT COMPONEER Maxilar Superior Premolar	2 uds.	14, 24	60023194	-	60023195	-	60023196	-	60023197	-
Set BRILLIANT COMPONEER Maxilar Inferior	6 uds.	31, 32, 33, 41, 42, 43	60023210	60023211	-	-	60023212	60023213	-	-


Repuestos BRILLIANT COMPONEER

Contenido	uds.	REF								
		Bleach Translucent ¹				Translucent ²				
		S	M	L	XL	S	M	L	XL	
Maxilar superior	11	1 ud.	60023122	60023128	60023134	60023140	60023158	60023164	60023170	60023176
	12	1 ud.	60023123	60023129	60023135	60023141	60023159	60023165	60023171	60023177
	13	1 ud.	60023124	60023130	60023136	60023142	60023160	60023166	60023172	60023178
	21	1 ud.	60023125	60023131	60023137	60023143	60023161	60023167	60023173	60023179
	22	1 ud.	60023126	60023132	60023138	60023144	60023162	60023168	60023174	60023180
	23	1 ud.	60023127	60023133	60023139	60023145	60023163	60023169	60023175	60023181
Maxilar inferior	31	1 ud.	60023146	60023152	-	-	60023182	60023188	-	-
	32	1 ud.	60023147	60023153	-	-	60023183	60023189	-	-
	33	1 ud.	60023148	60023154	-	-	60023184	60023190	-	-
	41	1 ud.	60023149	60023155	-	-	60023185	60023191	-	-
	42	1 ud.	60023150	60023156	-	-	60023186	60023192	-	-
	43	1 ud.	60023151	60023157	-	-	60023187	60023193	-	-

Maxilar superior						
FDI	13	12	11	21	22	23

Maxilar superior		
FDI	14	24

Maxilar inferior						
FDI	43	42	41	31	32	33

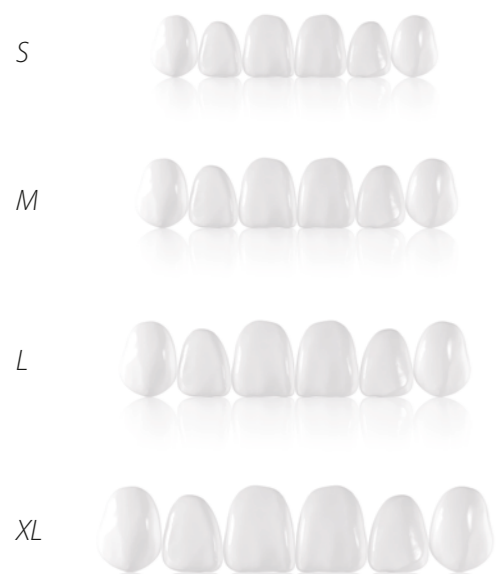

¹ El nuevo color Translucent es el antiguo color Universal de COMPONEER

² El nuevo color Bleach Translucent es el antiguo color White Opalescent de COMPONEER

Kit de jeringas BRILLIANT COMPONEER

REF	Artículo	Accesorios
60023214	Kit de introducción de jeringas	
		25 Pinceles COMPONEER
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar inferior M
		1 Placer
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar inferior S
		1 x 2,5 ml Etchant Gel S
		1 Instrumento de modelado MBC
		2 Placer Adapter
		10 Placer Stamp
		1 Pulidor de silicona 2303RA
		1 Pulidor de silicona 2311RA
		1 Pulidor de silicona 2403RA
		1 Pulidor de silicona 2411RA
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar superior L
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar superior M
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar superior S
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A1/B1
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A2/B2
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans)
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans)
		1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
		1 x 20 uds. Aguja aplicadora
		1 BRILLIANT COMPONEER Shade Guide
1 x 6	Carillas maxilar superior, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Carillas maxilar superior, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 6	Carillas maxilar superior, Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Carillas maxilar superior, Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 2	Carillas maxilar superior Premolar, Bleach Translucent, L, 14/24	
1 x 2	Carillas maxilar superior Premolar, Translucent, L, 14/24	



Kit de puntas BRILLIANT COMPONEER

REF	Artículo	Accesorios
60023215	Kit de introducción de puntas	
		25 Pinceles COMPONEER
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar inferior M
		1 Placer
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar inferior S
		1 x 2,5 ml Etchant Gel S
		1 Instrumento de modelado MBC
		2 Placer Adapter
		10 Placer Stamp
		1 Pulidor de silicona 2303RA
		1 Pulidor de silicona 2311RA
		1 Pulidor de silicona 2403RA
		1 Pulidor de silicona 2411RA
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar superior L
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar superior M
		1 COMPONEER Contour Guide - maxilar superior S
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A1/B1
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A2/B2
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans)
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans)
		1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
		1 x 20 uds. Aguja aplicadora
		1 BRILLIANT COMPONEER Shade Guide
1 x 6	Carillas maxilar superior, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Carillas maxilar superior, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 6	Carillas maxilar superior, Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Carillas maxilar superior, Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 2	Carillas maxilar superior Premolar, Bleach Translucent, L, 14/24	
1 x 2	Carillas maxilar superior Premolar, Translucent, L, 14/24	



Si desea más información sobre las formas y los tamaños visite nuestra página web www.componeer.info



En mi consulta realizo prácticamente todas las semanas una restauración con BRILLIANT COMPONEER. En mis talleres siempre me sorprende la rapidez con la que los usuarios primerizos aprenden a manipular y procesar las carillas. En muy poco tiempo se consiguen restauraciones para los dientes anteriores de muy alta calidad.

Dent. Patrizia Lucchi, Italia

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


En mi opinión, unas preparaciones mínimamente invasivas son la base de una solución terapéutica duradera. Con las carillas de composite, comparativamente finas y extraordinariamente estables, solo tengo que eliminar muy poca cantidad de sustancia dental sana. Esto permite utilizarlas de un modo rápido y sencillo en un gran número de indicaciones.

Dent. Sylvia Rahm, Alemania



© COLTENE – www.coltene.com




Coltene Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suiza
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com



ENLACE PARA MÁS
INFORMACIÓN

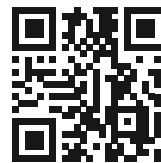

www.componeer.info

 **COLTENE**