

CanalPro CalciSeal

Calcium Silicate Based
Bioceramic Root Canal Sealer

Instruction For Use

COLTENE

SYMBOLS



: Use-by date



: Batch code



: Caution



: Keep Dry



: Manufacturer



: Date of Manufacture



: Authorized Representative in the European Community



: Temperature limit



: Consult instruction for use



: Keep away from sunlight



: Material number



: Unique device identifier



: Medical device



: Non-sterile device



: Do not re-use



MEDICLUS CO., LTD.

No. 1210, 134 Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungbuk 28576, Republic of Korea



Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany



KTR EUROPE GMBH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany
Phone : +49-6196-887170



Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

Rev.0 2025.12.23. MDI-DEOS01-00

CanalPro CalciSeal es un sellador de conducto radicular premezclado a base de silicato de calcio. Este producto fragua al reaccionar con la humedad y ofrece una excelente manejabilidad gracias a su consistencia adherente.

■ **Tiempo de fraguado**

- Dentro de 3,5 horas en condiciones húmedas intraorales.
- 30 minutos cuando está en contacto con un algodón húmedo dentro de la cavidad oral.

■ **Indicaciones**

Sellado permanente del conducto radicular.

■ **Composición**

Compuestos de silicato de calcio, óxido de zirconio, agentes espesantes.

■ **Método de aplicación**

1. Antes de la aplicación

- ① Revise la fecha de caducidad y asegúrese de que el envase no esté contaminado.
- ② Lea las instrucciones antes de utilizar el producto.
- ③ Asegúrese de usar protección respiratoria antes del procedimiento.
- ④ Verifique que el producto no haya endurecido antes de usarlo.

2. Aplicación

- ① Aísle el diente con un dique de goma; luego prepare y riegue el conducto. Séquelo completamente con puntas de papel.
- ② Seleccione un cono maestro adecuado que alcance la longitud de trabajo.
- ③ Coloque la punta aplicadora designada en la jeringa CanalPro CalciSeal y confirme que el material se dispense de manera uniforme.
- ④ Inserte la punta de la jeringa en el conducto, ajustando la profundidad para evitar que se atasque en las paredes del conducto.
- ⑤ Retire lentamente la jeringa mientras dispensa una capa delgada y uniforme de sellador a lo largo de las paredes del conducto.
- ⑥ Inserte suavemente el cono maestro, asegurándose de que el sellador se distribuya uniformemente a lo largo de toda la longitud de trabajo.
- ⑦ Si es necesario, agregue conos accesorios para lograr una obturación completa, evitando vacíos o sobrellenado.
- ⑧ Use un compactador térmico para eliminar la porción coronal del cono maestro y luego compacte la gutapercha reblandecida con un plugger frío.
- ⑨ Tome una radiografía para verificar el procedimiento.

■ **Contraindicaciones**

1. No utilice CanalPro CalciSeal en pacientes con alergia a materiales de silicato de calcio.
2. La reutilización de la punta incluida puede causar contaminación cruzada la reutilización está estrictamente prohibida.

■ **Precauciones**

1. Solo para uso dental.
2. No utilizar en pacientes con antecedentes de erupciones cutáneas o hipersensibilidad a la dermatitis.
3. Este producto está destinado únicamente para su uso en tejidos orales.
4. En caso de contacto con piel u ojos, enjuague abundantemente con agua limpia y busque atención médica si es necesario.
5. No utilizar este producto para fines distintos a su uso previsto; está prohibido su uso por personal no profesional.
6. Siga el procedimiento y observe todas las precauciones.
7. Mantenga el producto fuera del alcance de personas no relacionadas con el área dental, incluidos niños y personas mayores.
8. No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
9. Manipúlelo con cuidado para evitar daños por golpes o impactos.
10. Está prohibido utilizar este producto con otros componentes no designados.

■ **Advertencias**

Evite que el sellador se extruya más allá del foramen apical.
El sobrellenado puede causar dolor o reacciones inflamatorias.
Si el sellador entra en el seno maxilar, puede provocar sinusitis.
Si llega al conducto mandibular, puede causar alteraciones sensoriales o dolor intenso, requiriendo su retirada inmediata.

■ **Almacenamiento**

1. Este producto es sensible a la humedad; mantenga la tapa de la jeringa bien cerrada cuando no esté en uso.
2. Evite la exposición a la luz solar directa.
3. Almacenar entre 15°C y 25°C.
4. Después de su uso, guardar la jeringa en posición horizontal.

■ **Contenido**

REF 60043033 CanalPro CalciSeal 2gr x 1 Jeringa, puntas desechables

■ **Vida útil**

2 años a partir de la fecha de fabricación.