

# Imagine

una consistencia  
cremosa...



y descubra que es ***JET BLUE BITE***

*Material para el registro de la mordida*

- Permanece exactamente donde usted quiere
- ¡Sin resistencia a la mordida, sin rebote!
- Duro como la piedra para una mayor precisión, pero flexible para poder recortarlo fácilmente
- Elija la rapidez más indicada
  - **Fast** - tiempo de trabajo 30 segundos  
tiempo de fraguado 40 segundos
  - **Superfast** - tiempo de trabajo 20 segundos  
tiempo de fraguado 30 segundos

# Manejo extraordinario con un fraguado firme, preciso y rápido

Gracias a su consistencia suave y cremosa, el material para el registro de la mordida JET BLUEBITE fast / superfast fluye exactamente hasta el lugar que usted desea. Además le permite aplicar con precisión la cantidad requerida para conseguir un registro perfecto. El tiempo de fraguado del material en la boca

es mínimo, además éste se endurece para aumentar la precisión aunque mantiene un mínimo de flexibilidad para facilitar su recorte o tallado. Su excelente manejo es la clave para un ajuste oclusal perfecto desde el principio.

## Aplicación directa de JET BLUEBITE fast



Aplicación de JET BLUEBITE fast



Aplicación directa con la exclusiva punta aplicadora



Tiempo de trabajo ideal



Registro de la mordida



Registro final de la mordida



Fácil de recortar



Fácil de tallar



Accesorios importantes y prácticos: Una exclusiva punta aplicadora para obtener un ancho y una profundidad del molde precisos y constantes.

**Pruebe el JET BLUE BITE en el micro-System™ de 25 ml. ¡38 % menos de pérdida de material en las puntas de mezcla!**

JET BLUE BITE	Tiempo de trabajo	Tiempo de fraguado oral	Dureza final	Estabilidad dimensional en %
JET BLUEBITE fast	max. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUEBITE superfast	max. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

Medición interna

JET BLUEBITE fast 50 ml Envase sencillo	6491
Cartucho	1 x 50 ml
Mixing Tip Pink	6 uds.
Puntas aplicadoras	12 uds.
JET BLUEBITE fast 50 ml Reposición	6495
Cartuchos	4 x 50 ml
Mixing Tip Pink	12 uds.
Puntas aplicadoras	12 uds.

JET BLUEBITE superfast 50 ml Envase sencillo	6493
Cartucho	1 x 50 ml
Mixing Tip Pink	6 uds.
Puntas aplicadoras	12 uds.
JET BLUEBITE superfast 50 ml Envase reposición	6497
Cartuchos	4 x 50 ml
Mixing Tip Pink	12 uds.
Puntas aplicadoras	12 uds.

JET BLUEBITE Accessories		
50 ml System		
Mixing Tip Pink	40 uds.	6551
Puntas aplicadoras	100 uds.	6223
Dispensador 50/75	1 ud.	6900



© 2013 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Switzerland  
Tel +41 71 757 5300  
Fax +41 71 757 5301  
info.ch@coltene.com

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA  
Tel +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com

**COLTENE®**