

ROEKO Retracto / roEKO Stay-put

Instrucciones de uso

ES

Lea detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los hilos de retracción sirven para exponer el surco antes de tomar una impresión de la mandíbula.

2. USO PREVISTO

Los hilos de retracción Roeko sirven para exponer el surco e impedir que se produzca una hemorragia gracias a la presión ejercida.

3. COMPOSICIÓN

ROEKO Retracto

Hilo de algodón no impregnado trenzado o retorcido.

ROEKO Stay-put

Hilo de algodón no impregnado trenzado en el que se trenza un hilo de cobre (envuelto en hebras de nailon).

4. INDICACIONES/VENTAJAS CLÍNICAS

Retracción temporal del borde gingival.

5. CONTRAINDICACIONES

Sin contraindicaciones conocidas.

6. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠️ ADVERTENCIA

Acerca de ROEKO Stay-put: Evite tocar el hilo con equipos de electroterapia y láser.

Mantenga los productos sanitarios fuera del alcance de los niños.

7. EFECTOS SECUNDARIOS/INTERACCIONES

No se conocen reacciones perjudiciales ni efectos secundarios en pacientes o para el personal de la clínica.

8. GRUPO DE USUARIOS/PACIENTES

Los usuarios previstos son profesionales sanitarios (dentistas) y auxiliares dentales (enfermeros dentales). Este producto/familia de productos es adecuado para todos los grupos de pacientes.

9. PREPARACIÓN

Corte el hilo de retracción a la longitud que necesite. Retracto y Stay-put se pueden sumergir en soluciones de retracción gingival convencionales. Siga las instrucciones de uso del líquido seleccionado.

10. USO ADECUADO

Coloque el centro del hilo en el surco. A continuación, prosiga hacia los extremos del hilo. No es necesaria la superposición. Si el hilo no está impregnado, déjelo en el surco durante al menos 5 minutos. Si utiliza un líquido hemostático habitual, siga las indicaciones sobre tiempos de las instrucciones de uso de dicho líquido. Retire el hilo directamente antes de tomar la impresión.

11. MÉTODO DE PRUEBA PARA LA APLICACIÓN CORRECTA

A simple vista, el surco debe ser considerablemente más ancho.

12. VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO

Consulte los símbolos de la fecha de caducidad y del almacenamiento en el envase. El envase con el hilo debe almacenarse en un lugar seco.

13. ELIMINACIÓN

Este producto puede desecharse junto con los residuos domésticos. Podrán aplicarse normativas nacionales específicas del país.

14. OBLIGACIÓN DE NOTIFICACIÓN

Todos los incidentes graves ocurridos en relación con este producto deberán notificarse de inmediato al fabricante, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en el que estén registrados el usuario o el paciente.



Glossary



Consult instructions for use



Single use only



Keep dry



Marking of Conformity Europe



Legal Manufacturer



Expiry Date



Batch Code



Restricted device for professional use only



Medical Device

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany

www.coltene.com

Customer Center
service@coltene.com