

Adhesive

Mode d'emploi

FR

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Description du produit

COLTENE Adhesive est un adhésif universel pour matériaux pour empreinte à base de silicone à usage dentaire. Il peut être utilisé avec tous les porte-empreinte classiques (p. ex. en métal).

Utilisation prévue

Une mince couche de COLTENE Adhesive sert d'adhésif entre le matériau pour empreinte et le porte-empreinte. Il permet d'éviter le détachement du matériau pour empreinte du porte-empreinte au moment du retrait.

Composition

Principal composant : polysiloxane

Indications

Utilisation en association avec des dispositifs médicaux.

Contre-indication

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au principal ingrédient de COLTENE Adhesive.

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P370+P378 En cas d'incendie : utiliser de l'eau nébulisée, du dioxyde de carbone ou de de la mousse anti-alcool pour l'extinction.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un lieu sûr.



GHS02 GHS09

⚠ AVERTISSEMENT

Contient de l'hexaméthylsiloxane
Utiliser exclusivement dans un endroit bien ventilé.
Tenir à l'écart des sources d'ignition.
Toujours porter des gants.
Refermer le flacon immédiatement après usage.
L'utilisation de COLTENE Adhesive est réservée aux personnes spécialisées telles que le dentiste et l'assistant(e) dentaire ayant les qualifications spécifiques.

Effets secondaires / Interactions

Aucune réaction indésirable ni aucun effet secondaire pour le patient et/ou le personnel dentaire n'ont été signalés.

Utilisateurs / Groupes de patients

L'application est effectuée par des professionnels dentaires. Convient à tous les groupes de patients.

USAGE NORMAL

Appliquer au fond de tous les porte-empreinte une couche de Coltène Adhesive aussi mince que possible et laisser cette couche sécher pendant au moins 1 min ou la sécher à l'air comprimé.
Refermer le flacon immédiatement après usage.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyage du porte-empreinte

Le matériau pour empreinte peut être retiré avec un instrument émoussé. Le trempage dans un solvant universel du commerce ou de l'éther de pétrole dissout

COLTENE Adhesive. Ces solvants doivent exclusivement être utilisés dans un endroit bien ventilé. Nettoyer et désinfecter les porte-empreinte selon les procédures habituelles. Les porte-empreinte en plastique jetables n'ont pas à être nettoyés.

Durée de conservation et stockage

COLTENE Adhesive est efficace au moins jusqu'à la date limite d'utilisation qui figure sur les récipients, dans un flacon fermé correctement et conservé à une température comprise entre 15 et 23 °C / 59 et 73 °F et à une humidité ambiante relative de 50 %. Durée de vie après la première ouverture : 3 mois.

Mise au rebut

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans le cadre des règlements et après avoir pris contact avec la déchetterie et l'administration compétente.

Obligation de signalement

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent impérativement être signalés sans délai au fabricant et aux autorités compétentes.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Environment



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltene/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 COLTENE