



## FONCTIONNEMENT DE BASE


### 1 Mettre l'appareil sous tension.

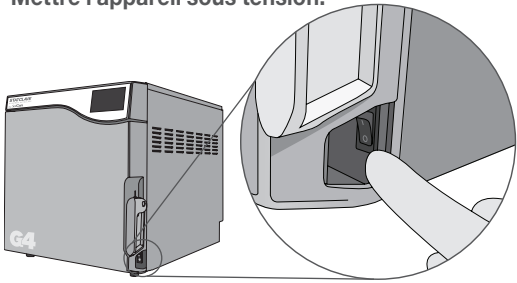


### 2 Remplir les DEUX réservoirs avec de l'eau distillée.

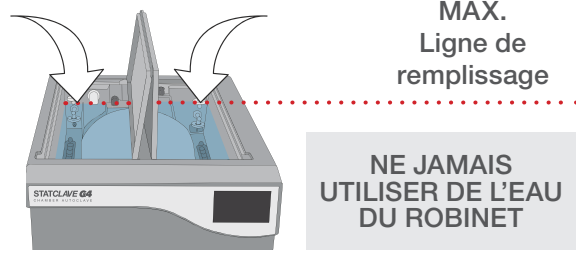


### 3 Configurations de chargement.

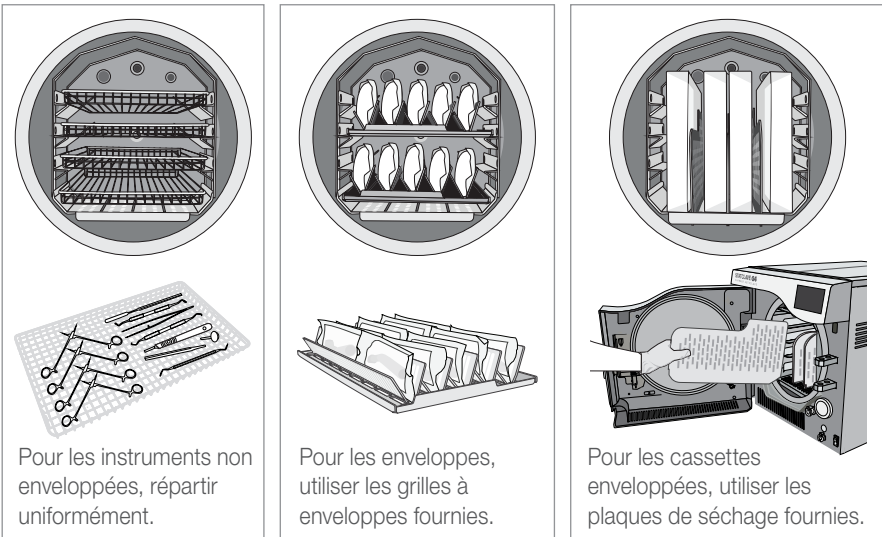


### 4 Fermer et verrouiller la porte.

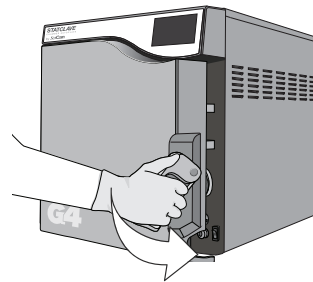


### 5 Sélectionner un cycle.

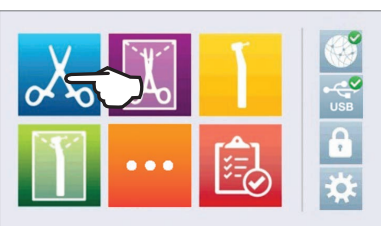



### 6 Appuyer sur l'icône de DÉMARRAGE.

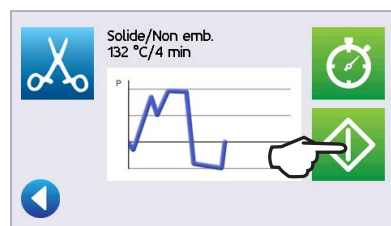


### 7 Lorsque le cycle est terminé, appuyer sur l'icône d'ARRÊT, ouvrir la porte et sortir le chargement.

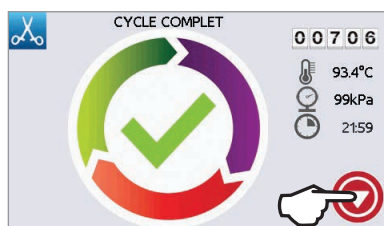

## ÉCRAN TACTILE

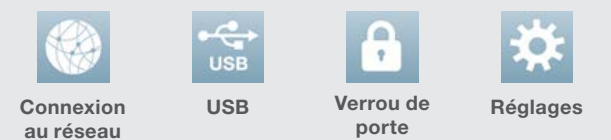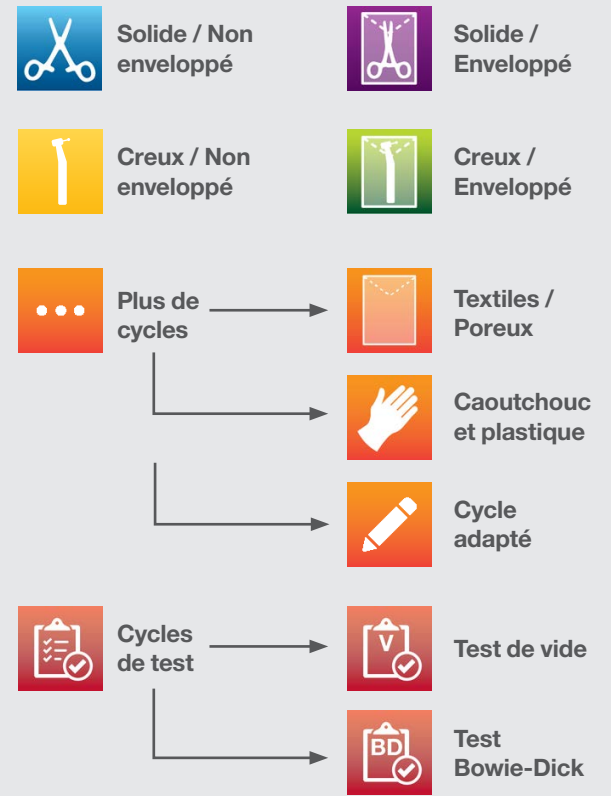


## DÉVERROUILLAGE DE PORTE

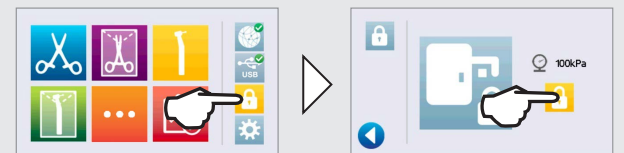


## OPTIONS DE REMPLISSAGE

### Remplir manuellement depuis le dessus

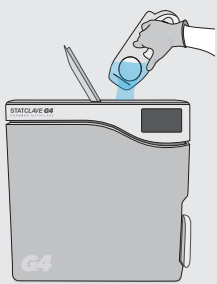


### Remplir manuellement depuis le devant

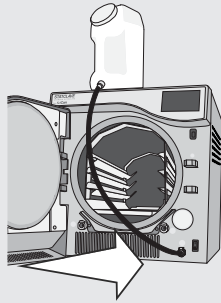

### Remplissage automatique


S'assurer que le réglage du Remplissage d'eau est configuré sur AUTOMATIQUE.

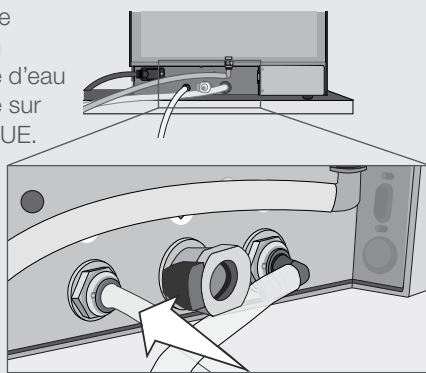

## OPTIONS D'ÉVACUATION


### Direct au drain

Quincaillerie livrée avec l'appareil.

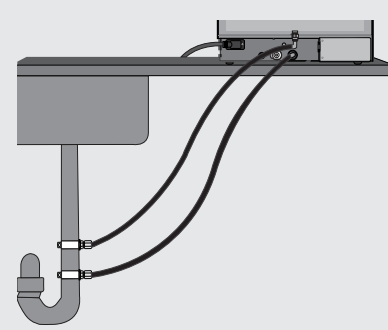

### Bouteille d'eaux usées

Vérifier et vider la bouteille régulièrement, tous les 4 cycles.

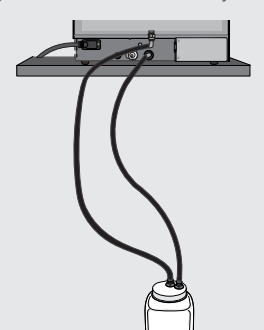

## CALENDRIER D'ENTRETIEN

<b>Chaque jour</b>	Pour nettoyer le joint d'étanchéité de la porte, l'essuyer avec un chiffon humide, non pelucheux. Nettoyer les surfaces externes avec un chiffon humide, non pelucheux.
--------------------	--

<b>Mensuellement ou tous les 100 cycles</b>	Vidanger et nettoyer les réservoirs d'eau, ainsi que les filtres des réservoirs à eau.
---	--

<b>Mensuellement ou tous les 100 cycles</b>	Inspecter et nettoyer les trois filtres de chambre.
---	---

Nettoyer la citerne d'eau distillée externe, si elle a été installée.

Nettoyer la grille et les plateaux de chambre.

<b>Chaque semaine</b>	Nettoyer la chambre et, le cas échéant, la bouteille d'eaux usées. Désinfecter les surfaces externes.
-----------------------	--

<b>Tous les 6 mois ou 500 cycles</b>	Exécuter toutes les tâches de nettoyage indiquées sur le calendrier mensuel. Remplacer le filtre bactériologique.
--------------------------------------	--

<b>Tous les 6 mois ou 500 cycles</b>	Remplacer le joint d'étanchéité de la porte.
--------------------------------------	--

<b>Chaque année ou tous les 1 000 cycles</b>	Un entretien complet de l'autoclave (par un technicien agréé de SciCan) est recommandé.
--	---

## Pièces de rechange et accessoires

<b>01-115481S</b>	Joint d'étanchéité de porte, STATCLAVE G4
<b>01-115479S</b>	Filtre à air bactériologique
<b>01-115478S</b>	Jeu de filtres de chambre (3 filtres)
<b>01-115487S</b>	Grille de chambre
<b>01-115482S</b>	Plateau maillé (1 pce)
<b>01-115483S</b>	Grille à enveloppe (1 pce)
<b>01-115485S</b>	Extracteur de plateau avec goupille de déverrouillage de porte (dans la poignée)
<b>01-115484S</b>	Plaque de séchage (1 pce)
<b>01-115480S</b>	Filtre pour réservoirs (1 pce)
<b>01-115490S</b>	Tubes d'échappement - longueur de 4 m / 13 pi (2 pces)
<b>USB-STICK2</b>	Clé USB
<b>01-115373</b>	Récipient de remplissage manuel avec tube à déconnexion rapide pour l'option de remplissage par le devant
<b>01-115374</b>	Pompe de remplissage automatique

## IMPORTANT!

Les utilisateurs de ce dispositif doivent s'assurer de bien sélectionner le cycle de stérilisation le plus approprié en fonction des recommandations des principales autorités de contrôle des infections, ainsi qu'en fonction des directives et des recommandations réglementaires locales.