

Imaginez

la sensation...



Essayez avec

**JET BLUE BITE**

*Matériau d'enregistrement de l'occlusion*

- Reste exactement à l'endroit où vous le déposez
- Aucune résistance à la fermeture
- Positionnement fiable des modèles, sans déplacement élastique
- Précis grâce à sa dureté, tout en étant assez flexible pour un ajustage aisé
- Choisissez la vitesse idéale :

**Fast** - Temps de travail de 30 sec.

Temps de prise en bouche de 40 sec.

**Superfast** - Temps de travail de 20 sec.

Temps de prise en bouche de 30 sec.





# Précision, Rigidité, Prise rapide : le matériau idéal

JET BLUE BITE fast / superfast, avec sa consistance crèmeuse, reste exactement là où vous le déposez. Les embouts bec-de-canard spécifiques vous permettent d'appliquer précisément un ruban régulier de matériau. Son temps de prise rapide, sa dureté finale élevée, garantissent la précision de vos enregis-

trements. Le réglage et la découpe des clés occlusales sont facilités par son élasticité résiduelle. Ces caractéristiques exceptionnelles garantissent une intégration occlusale parfaite de vos restaurations, sans ajustements laborieux.

## Application clinique de JET BLUE BITE fast



Illustration clinique



Application directe de Jet Blue Bite fast avec l'embout bec-de-canard



Temps de prise idéal



Enregistrement de l'occlusion



Enregistrement occlusal terminé



Découpage aisé des excès



Ajustement final facile



Les accessoires indispensables : l'embout bec-de-canard unique délivre un ruban de matériau de largeur et d'épaisseur régulières

**Essayez JET BLUE BITE en cartouches microSystem™ de 25ml. 38% d'économie de matériau dans les embouts mélangeurs !**



JET BLUE BITE	Temps de travail	Temps de prise intra-oral	Dureté finale	Stabilité dimensionnelle (%)
JET BLUE BITE fast	max. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE BITE superfast	max. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

Données internes

JET BLUE BITE fast microSystem™ Single Pack	6492
Cartouches	2 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	10 pièces.
Embouts applicateurs plats	10 pièces.
JET BLUE BITE fast microSystem™ Réassort	6496
Cartouches	8 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	20 pièces.
Embouts applicateurs plats	20 pièces.
JET BLUE BITE fast 50 ml Single Pack	6491
Cartouche	1 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	6 pièces.
Embouts applicateurs plats	6 pièces.
JET BLUE BITE fast 50 ml Réassort	6495
Cartouches	4 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	12 pièces.
Embouts applicateurs plats	12 pièces.

JET BLUE BITE superfast microSystem™ Single Pack	6494
Cartouches	2 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	10 pièces.
Embouts applicateurs plats	10 pièces.
JET BLUE BITE superfast microSystem™ Réassort	6498
Cartouches	8 x 25 ml
Embouts mélangeurs neutral	20 pièces.
Embouts applicateurs plats	20 pièces.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Single Pack	6493
Cartouche	1 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	6 pièces.
Embouts applicateurs plats	6 pièces.
JET BLUE BITE superfast 50 ml Réassort	6497
Cartouches	4 x 50 ml
Embouts mélangeurs pink/medium	12 pièces.
Embouts applicateurs plats	12 pièces.

Accessoires JET BLUE BITE		
microSystem™		
Embouts mélangeurs neutral	40 pièces.	<b>6214</b>
Embouts mélangeurs neutral	100 pièces.	<b>6215</b>
Embouts applicateurs plats	100 pièces.	<b>6223</b>
Pistolet microSystem™ MK II	1 pièce.	<b>6270</b>

Accessoires JET BLUE BITE		
50 ml System		
Embouts mélangeurs pink/medium	40 pièces.	<b>6551</b>
Embouts applicateurs plats	100 pièces.	<b>6223</b>
Pistolet 50/75	1 pièce.	<b>6900</b>

www.coltenewhaledent.com  
© 2006 Coltène/Whaledent AG

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
office@coltenewhaledent.ch

**Coltène/Whaledent S.à.r.l.**  
19 Boulevard Alexandre Oyon  
72058 Le Mans Cedex 2/France  
Tél. +33 (0)2 43 39 30 30  
Fax +33 (0)2 43 39 30 40  
cw@coltenewhaledent.fr

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
Tel. +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
productinfo@coltenewhaledent.com

**coltène**   
**whaledent** 