


HANEL

Une précision au point près.

Occlusion précise pour une mâchoire alignée.

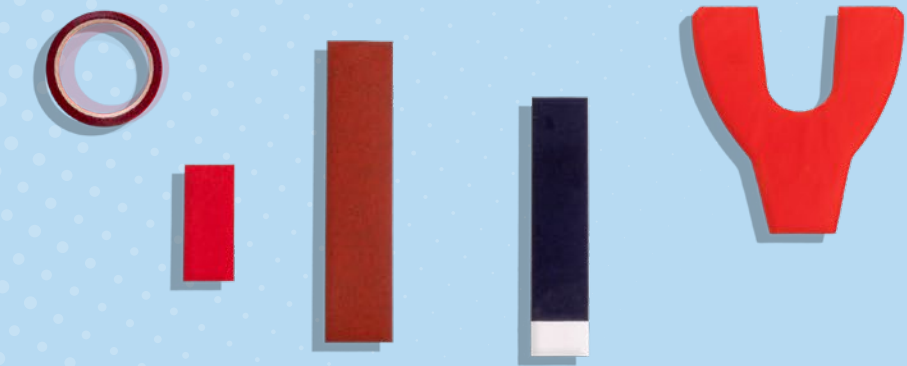

Une grande précision.

Détection et traitement des troubles occlusaux

Le contrôle et la correction de l'occlusion sont des techniques très exigeantes de la médecine dentaire moderne. Grâce à l'offre complète de notre gamme de produits HANEL, nous sommes en mesure de vous aider à détecter les interférences occlusales. Éliminez et prévenez les troubles causés par les points de contact les plus infimes responsables de douleurs et lésions dentaires chez vos patients.

Outre notre matériel de contrôle HANEL, nous proposons également une gamme d'accessoires qui simplifient la manipulation.



Une précision optimale grâce à la diffusion progressive de couleur

Nos papiers à articuler et feuilles d'occlusion HANEL fonctionnent selon le principe de la diffusion de couleur progressive. La pression croissante des dents entraîne une libération accrue de couleur par notre équipement de contrôle. Les surfaces de coloration intense indiquent un contact occlusal, tandis que le point de contact effectif n'est que très légèrement marqué et entouré de couleur.



Effets des interférences occlusales

Dans le cas de restaurations, extractions ou traitements orthodontiques, la moindre interférence fonctionnelle modifie l'occlusion statique et dynamique dans le système crano-mandibulaire. Les symptômes de tels troubles sont le bruxisme, les troubles temporo-mandibulaires, les maux de tête, les tensions musculaires, et même les acouphènes.

Syndrome de DCM = dysfonctionnement crano-mandibulaire

Maux de tête	Problèmes de l'ATM
Hypersensibilité à la lumière	Bruxisme
Otalgie	Difficultés à avaler
Acouphènes	Douleur à la nuque
Sensibilité au bruit	Douleur à l'épaule

Étape 1

Papier à articuler

Pour le premier niveau de contrôle, nous recommandons d'utiliser nos papiers à articuler HANEL de 200 µ, 80 µ et 40 µ.

Tous nos papiers sont un excellent choix pour le contrôle de l'occlusion statique et se caractérisent par




- un marquage efficace et fiable dans différentes conditions
- un marquage sur différents matériaux
- leur application au cabinet et au laboratoire






Papier à articuler 200 µ

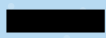Pour le premier niveau de contrôle.

- Disponible en bandelettes dans un distributeur pratique
- Aperçu rapide des contacts occlusaux

		200 µ		
	300 feuilles (18 × 50 mm)		480392	
			480397	

Explication








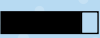





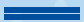



-  Une face, une couleur
-  Double face, une couleur
-  Double face, deux couleurs



Papier à articuler 80 µ et 40 µ

Pour un contrôle intermédiaire précis.

- Disponible en rouleaux ou feuilles en forme de I, de C et de U
- Pour un marquage facile, rapide et précis
- Double face colorée
- Disponible en une ou deux couleurs
- Couleur sombre pour un bon marquage


		80 µ	40 µ
	72 feuilles	 480367	480337
		 480364	-
		 -	480332
	144 feuilles	 480377	-
		 480374	-
	144 feuilles (20 × 105 mm)	 480387	-
		 480384	-
	120 feuilles (22 × 110 mm)	 -	480352
		 -	480354
		 -	480357
	15 m (22 mm de large)	 -	480322
		 -	480327



Étape 2

Feuille d'occlusion

Pour le deuxième niveau de contrôle, nous recommandons nos feuilles d'occlusion fines HANEL de 12 μ . Identifiez les points de contact fins et bénéficiez aussi du principe de transfert de couleur progressif. Pour la feuille de 22 mm de largeur, un distributeur pratique est disponible avec un cutter intégré.

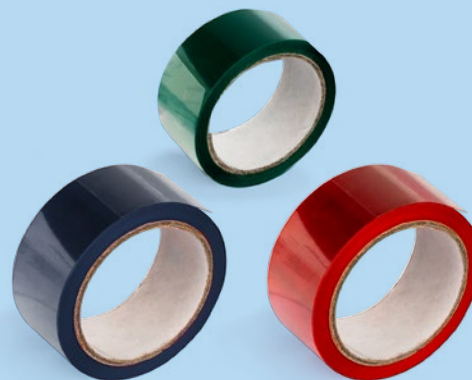








Nos feuilles

- sont très fines
- garantissent un marquage d'une précision extrême des contacts
- marquent les points et les micro-contacts
- ne s'étalent pas
- sont résistantes à la déchirure
- sont à une face ou double face
- sont à une couleur ou deux couleurs

Feuille d'occlusion 12 μ









Pour un ajustement occlusal précis, la feuille HANEL répond à toutes les exigences de l'occlusodontie contemporaine. Disponible en rouleau d'une largeur de 22 mm et 80 mm.

	12 μ 22 mm \times 25m	12 μ 80 mm \times 25 m
	480021	480031
	480022	480032
	480023	480033
	480041	480051
	480042	480052
	480043	480053
	480165	-

OccluFoil+ 12 μ

Peut être également utilisée pour la technique de test de l'occlusion qui exige que le patient serre les dents ou que le dentiste tire le film.

- Bien plus résistante à la déchirure
- Extrêmement fine

	12 μ 22 mm \times 25 m
	60022258
	60022259
	60022260
	60022262
	60022263
	60022264
	60022266


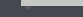
Étape 3

Feuille Shimstock

Pour l'étape finale, nous recommandons notre feuille Shimstock HANEL 8 μ .

La feuille Shimstock est une feuille de métal sans revêtement de couleur. Lorsque les dents sont en occlusion normale, cette feuille doit pouvoir être retirée à travers les points de contact travaillés. En présence de tonus musculaire, la feuille est retenue.



	8 μ 8 mm \times 5 m
	480180

Accessoires



Distributeur de feuilles

Pour rouleaux de 22 mm.

- Transparent
- Avec cutter intégré

480620



Pince de Miller

Une pince de précision est indispensable pour travailler avec des feuilles extra-fines. Toutes les pinces sont autoclavables.

Droite 480610

Courbée 480612



Spray occlusal - Okklu-top

Pour contrôler les contacts proximaux et sur l'intrados des couronnes et des bridges au laboratoire.

- Spray d'indication micropulvérisé
- La couleur est vaporisée uniformément
- La buse spéciale garantit une application précise même dans les zones étroites
- Un marquage efficace des dents en or, céramique et plastique
- Même les petits points de contact peuvent être identifiés
- Élimination facile avec de l'eau ou de l'alcool



Flacon, 75 ml ● 480410
● 480411

© COLTENE – www.coltene.com

Mentions légales / Éditeur

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
FR-59260 Lezennes
+33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com

Centre de services

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UJFN)
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (CEST)

 **COLTENE**