

MATÉRIAU POUR EMPREINTE À BASE DE SILICONE A



UN PETIT PAS POUR LE DENTISTE
UN GRAND PAS POUR LA DENTISTERIE

PRESIDENT

The Original

 **COLTENE**


PRESIDENT

The Original

UN PETIT PAS POUR LE DENTISTE
UN GRAND PAS POUR LA DENTISTERIE

**LE LANCEMENT DE PRESIDENT EN 1975 –
PREMIER SILICONE A SUR LE MARCHÉ –
EST CONSIDÉRÉ COMME UN JALON DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIAUX
POUR EMPREINTES DENTAIRES DE HAUTE
PRÉCISION.**

En utilisant les élastomères polyvinylsiloxanes (PVS) pour la première fois, les utilisateurs de PRESIDENT ont obtenu une stabilité et une précision dimensionnelles sans précédents qui caractérisent, aujourd'hui, le silicone A. La marque PRESIDENT reste une famille de produits satisfaisants grâce à sa qualité absolue qui continue d'être optimisée.

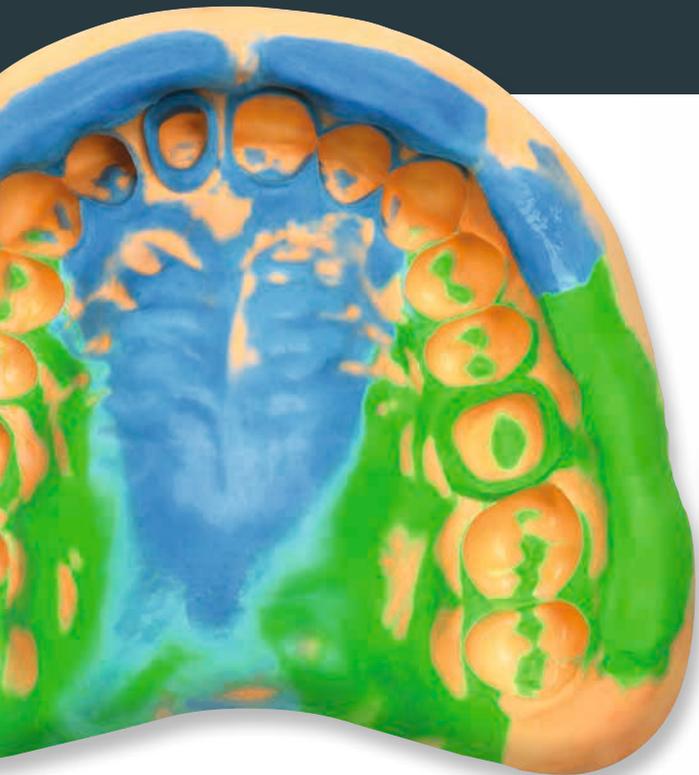



MATÉRIAUX POUR PORTE-EMPREINTE PRESIDENT

Les matériaux pour porte-empreinte PRESIDENT sont convainquants par leur résistance au déchirement et leur élasticité élevées. Grâce au retrait sans résidu, les empreintes sont précises et réussies, même dans les conditions les plus difficiles. PRESIDENT heavy body et MonoBody contiennent des activateurs de surface, sont thixotropes et se caractérisent par une mise en pression rapide, ce qui permet de diriger facilement le matériau de rebasage dans les endroits difficiles d'un point de vue clinique. Les matériaux pour empreintes PRESIDENT se mélangent rapidement et sont proposés avec trois duretés finales différentes adaptées pour chaque cas.



CINQ MATÉRIAUX POUR PORTE-EMPREINTE – VOTRE CHOIX

Pour répondre aux différentes indications et préférences, la gamme PRESIDENT contient trois matériaux pour empreintes. Vous pouvez choisir une dureté élevée, moyenne ou faible pour une stabilité optimale et une découpe aisée. PRESIDENT offre en outre une grande résistance au déchirement pour une précision et une stabilité dimensionnelle élevées.

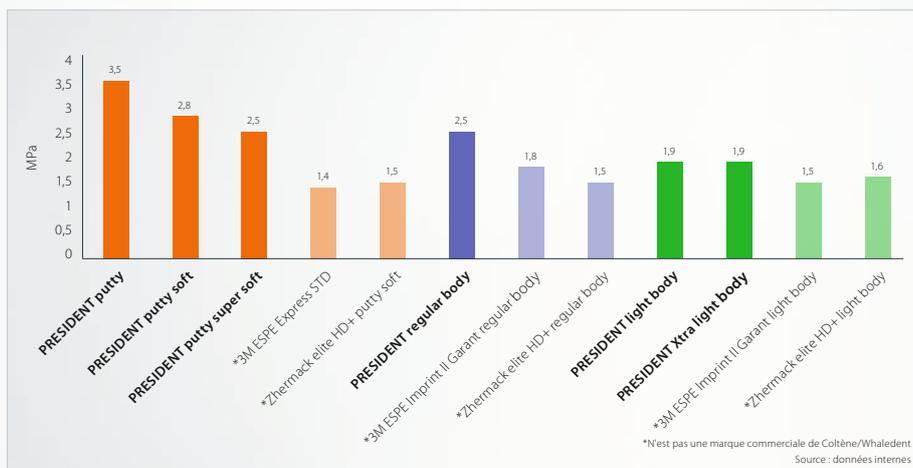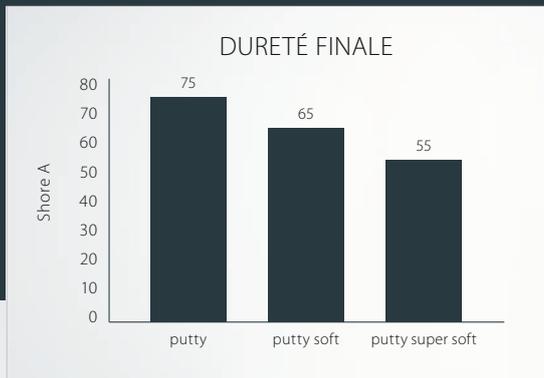

RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT

PRESIDENT

The Original

MATÉRIAUX DE REBASAGE PRESIDENT

Les matériaux de rebasage PRESIDENT sont stables, tout en étant fluides sous pression pour un enregistrement précis de tous les détails marginaux. Les propriétés hydrophiles résultent des agents de surface présents dans le matériau. En présence d'humidité, ces additifs migrent à la surface et réduisent la tension de surface, améliorant ainsi la mouillabilité.



Xtra light body



light body



regular body

TROIS MATÉRIAUX DE REBASAGE – VOTRE CHOIX

Tous les matériaux de rebasage PRESIDENT présentent des propriétés visco-élastiques idéales en milieu humide. Choisissez la viscosité – de faible à élevée – que vous préférez et selon vos besoins.



Xtra light body




light body




regular body

Les propriétés de nivellement et la thixotropie des matériaux de rebasage PRESIDENT sont le résultat de contours précis.

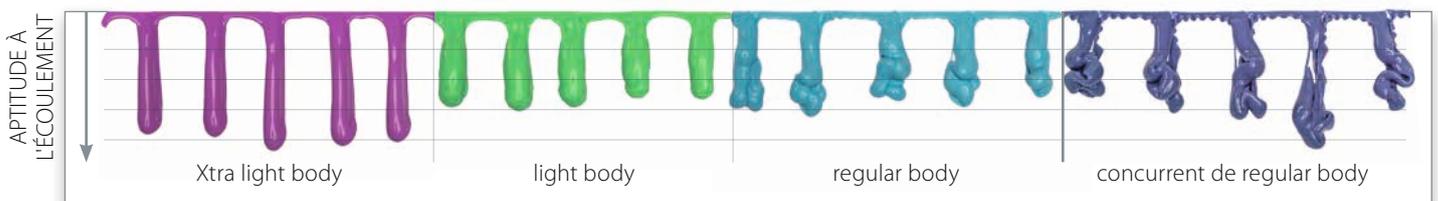

PRESIDENT

The Original

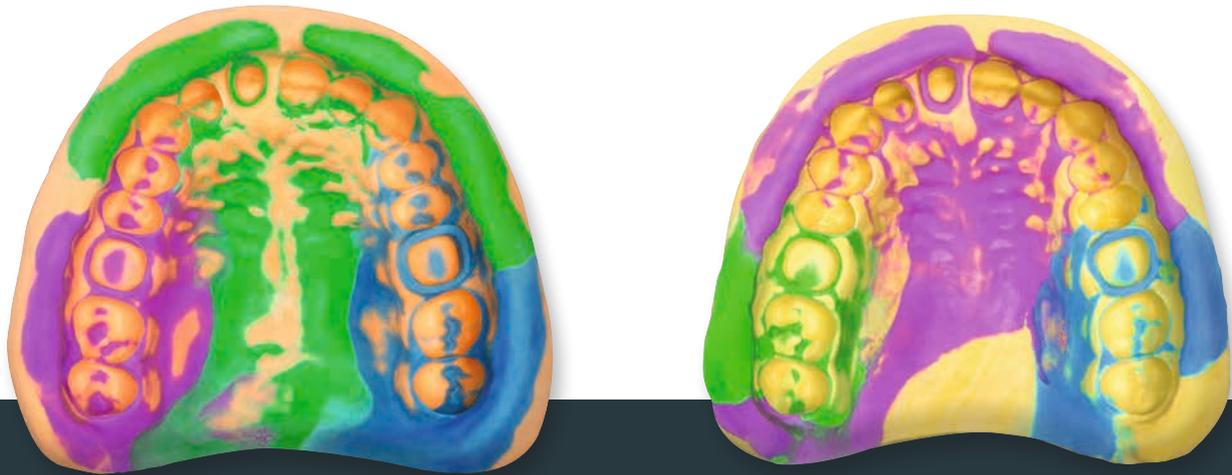

NOUVELLES COULEURS

Les nouvelles couleurs vives de la famille PRESIDENT offrent un meilleur contraste entre les matériaux de rebasage et de porte-empainte pour une meilleure lisibilité des détails.

	Aptitude à l'écoulement	Viscosité	Dureté finale	Résistance au déchirement	Reprise élastique	
REBASAGE	Xtra light body		50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %	
	light body		50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %	
	regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
PORTE-EMPRIENTE	putty super soft		55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %	
	putty soft		65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %	
	putty		75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %	

LA GAMME PRESIDENT EN UN COUP D'ŒIL

PRESIDENT

The Original



RÉFÉRENCES PRODUITS

50 ml

- 60019937** **PRESIDENT** The Original **Xtra light body**
2 cartouches de 50 ml
12 embouts mélangeurs universels
- 60019938** **PRESIDENT** The Original **light body**
2 cartouches de 50 ml
12 embouts mélangeurs universels
- 60019939** **PRESIDENT** The Original **regular body**
2 cartouches de 50 ml
12 embouts mélangeurs universels

75 ml

- 60019941** **PRESIDENT** The Original **heavy body**
2 cartouches de 75 ml
8 embouts mélangeurs turquoise

putty

- 60019942** **PRESIDENT** The Original **putty**
2 x 300 ml, 2 x cuillères
- 60019943** **PRESIDENT** The Original **putty soft**
2 x 300 ml, 2 x cuillères
- 60019944** **PRESIDENT** The Original **putty super soft**
2 x 300 ml, 2x cuillères
- 60022166** **PRESIDENT** The Original **fast putty soft**
2 x 300 ml, 2 x cuillères

System 360

- 60019946** **PRESIDENT** The Original **MonoBody Réassort**
2 cartouches de 380 ml
- 60019947** **PRESIDENT** The Original **heavy body Kit introduction**
1 cartouche de 380 ml
10 embouts mélangeurs dynamiques
1 bague de serrage
- 60019948** **PRESIDENT** The Original **heavy body Réassort**
2 cartouches de 380 ml

Cartouches

- 60019949** **PRESIDENT** The Original **light body**
1 x 53 ml Base
1 x 53 ml Catalyseur
- 60019950** **PRESIDENT** The Original **regular body**
1 x 53 ml Base
1 x 53 ml Catalyseur

Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltène/Whaledent s.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls
Ohio 44223/É.-U.
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**