

# CanalPro

## Protocole d'irrigation recommandé

Application d'une digue dentaire et désinfection de la dent avec **CanalPro NaOCl 3%**

Rinçage lors de la préparation avec **CanalPro NaOCl 3%** ou **6%**

Élimination de la boue dentinaire après la préparation : 1 min de rinçage avec **CanalPro EDTA 17%**

**CanalPro NaOCl 3% ou 6%**  
(au moins 10 ml et 5 min)

**Canal Pro CHX 2%** (au moins 10 ml et 5 min)

**CanalPro NaOCl 3% ou 6%**  
(au moins 10 ml et 5 min)

Neutralisation de **NaOCl** avec une solution de NaCl à 0,9 %/de l'alcool

Rinçage avec **CanalPro CHX 2%**  
(au moins 10 ml et 5 min)

Séchage avec les **pointes de papier ROEKO / HyFlex** et/ou **Surgitip-endo ROEKO**

Obturation avec **ROEKO GuttaFlow2 / bioseal**

**Important !** Suite à l'utilisation de **NaOCl** et avant le recours au **CHX**, le canal radiculaire doit être neutralisé par une irrigation intermédiaire (par ex. NaCl ou alcool). **Veillez noter :** le rinçage au NaCl est normalement recommandé avant la mesure de la longueur à l'aide de localisateurs d'apex.

# CanalPro SyringeFill Références



CanalPro Distributeur de solution	RÉF.
CanalPro Distributeur de solution sur table (1 x support pour bouteille incl. base, 3 x bouchons pour station CanalPro)	60031347
CanalPro Distributeur de solution mural (1 x support mural pour bouteille, 3 x bouchons pour station CanalPro)	60031348
Bouchon pour station CanalPro (bouchon avec système luer lock intégré)	60019662
CanalPro Solutions d'irrigation	
CanalPro NaOCl 3%, 500 ml	65002866
CanalPro NaOCl 6%, 500 ml	65002867
CanalPro EDTA 17%, 500 ml	60019651
CanalPro EDTA 17%, 100 ml	60019654
CanalPro CHX 2%, 500 ml	60019658
CanalPro CHX 2%, 100 ml	60019659
CanalPro Seringues colorées	
CanalPro colour 5ml seringues rouges, 50 pcs.	60019321
CanalPro colour 5ml seringues bleues, 50 pcs.	60019322
CanalPro colour 5ml seringues jaunes, 50 pcs.	60019323
CanalPro colour 5ml seringues blanches, 50 pcs.	60019324
CanalPro colour 10ml seringues rouges, 50 pcs.	60011173
CanalPro colour 10ml seringues bleues, 50 pcs.	60011174
CanalPro colour 10ml seringues jaunes, 50 pcs.	60011175
CanalPro colour 10ml seringues blanches, 50 pcs.	60011176
Embouts d'irrigation	
CanalPro Slotted-End Tips 27 ga, 100 pcs.	60011167
CanalPro Slotted-End Tips 30 ga, 100 pcs.	60011168
CanalPro Side-Port Tips 27 ga, 100 pcs.	60011169
CanalPro Side-Port Tips 30 ga, 100 pcs.	60011170

## Mentions légales / Éditeur

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten  
+41 71 757 5300  
info.ch@coltene.com

## Contact du service commercial

**Coltène/Whaledent S.a.r.l.**  
Synergie Park, 3 avenue Louis Néel  
FR-59260 Lezennes  
+33 320 64 64 00  
info.fr@coltene.com

## Centre de services

service@coltene.com  
00 800 11 0000 12 (UIFN)  
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (CEST)