


MATÉRIAU POUR ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION À BASE DE SILICONE A

 COLTENE

Jet Blue Bite

Enregistrement de l'occlusion
de la plus haute précision

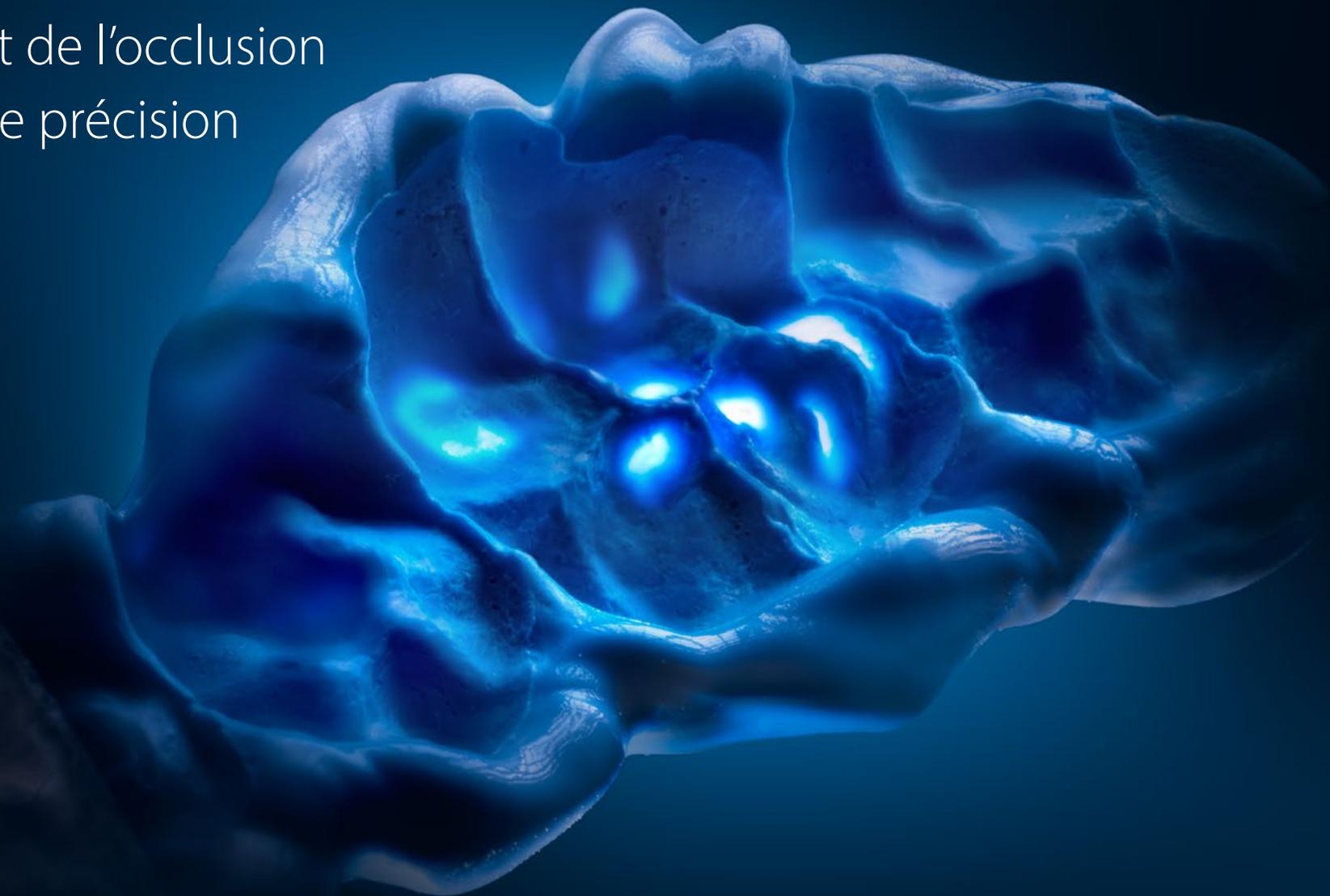



« Je préfère utiliser Jet Blue Bite superfast. Il est au départ très mou - le patient ne ressent donc aucune résistance à l'occlusion - et je peux facilement maintenir la position pendant le temps de prise qui est très court. Le matériau peut aisément être injecté entre les dents pour enregistrer les positions latérale, mésiale et prognathe. Jet Blue Bite superfast me permet d'obtenir d'excellents résultats rapidement et facilement. »

Dr Sylvia Rahm, Allemagne

« J'aime travailler avec Jet Blue Bite et je suis impressionné par sa stabilité dimensionnelle durable et sa résistance à la rupture. Les empreintes de l'occlusion peuvent être traitées rapidement et efficacement avec un bistouri ou des fraises au carbure, ce qui me permet de faire des ajustements précis pour les articulations. Ce produit facilite mon travail et offre une reproduction des détails exceptionnelle. »

Robert Arvai, prothésiste dentaire, Suisse



Enregistrement de l'occlusion de la plus haute précision

Un enregistrement précis de l'occlusion est essentiel pour garantir une reproduction de l'occlusion fidèle à la réalité entre les dents supérieures et inférieures dans l'articulateur. Les exigences à l'égard du matériau sont par conséquent variées. Les décennies d'expertise de COLTENE en matière de matériaux à base de silicone de haute qualité se reflètent dans Jet Blue Bite, un matériau d'enregistrement de l'occlusion qui permet d'obtenir des résultats rapides et précis.



Consistance crémeuse

- Occlusion parfaitement naturelle grâce à la consistance crémeuse
- Pas d'effet rebond lors de la fermeture
- Ne s'infiltré pas dans les espaces interdentaires

Temps de mise en œuvre et de prise

- Jet Blue Bite est proposé avec deux temps de prise : fast et superfast
- Le court délai en bouche le rend confortable pour le patient
- Les temps de prise courts réduisent le risque de déformation de l’empreinte de l’occlusion due à un mouvement pendant l’enregistrement de l’occlusion

Jet Blue Bite fast		
●	Temps de travail	30
	Temps de prise	40
	Total	70
<hr/>		
Jet Blue Bite superfast		
●	Temps de travail	20
	Temps de prise	30
	Total	50
<hr/>		
Produit A		
●	Temps de travail	30
	Temps de prise	90
	Total	120
<hr/>		
Produit B		
●	Temps de travail	30
	Temps de prise	30
	Total	60
<hr/>		
Produit C		
●	Temps de travail	15
	Temps de prise	45
	Total	60
<hr/>		
Produit D		
●	Temps de travail	30
	Temps de prise	60
	Total	90



Souplesse avec une dureté finale élevée

- Les matériaux ayant une dureté Shore A élevée sont plus résistants à l'usure et à la déformation. Ils peuvent être utilisés sur une longue période.
- L'association d'une dureté finale élevée et d'une légère souplesse permet le meulage ou la découpe dans casser l'empreinte de l'occlusion.
- La dureté Shore A de Jet Blue Bite fast et superfast est de 88 Shore A.



Caractéristiques techniques

Enregistrement de l'occlusion	Silicone	Teinte	Dureté Shore*	Stabilité dimensionnelle	Temps de travail	Temps de prise	Goût
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutre
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutre

La dureté Shore peut varier d'environ +/-2

Références produits

Réassorts

6491 Jet Blue Bite fast

1 × Cartouche, 50 ml
1 × Universal Mixing Tip, 6 unités
1 × Spreader Tips, 6 unités

6493 Jet Blue Bite superfast

1 × Cartouche, 50 ml
1 × Universal Mixing Tip, 6 unités
1 × Spreader Tips, 6 unités

6495 Jet Blue Bite fast

4 × Cartouches, 50 ml
1 × Universal Mixing Tip, 12 unités
1 × Spreader Tips, 12 unités

6497 Jet Blue Bite superfast

4 × Cartouches, 50 ml
1 × Universal Mixing Tip, 12 unités
1 × Spreader Tips, 12 unités

Accessoires

60019663 Universal Mixing Tip, 40 unités

60019694 Universal Mixing Tip, 100 unités

6223 Spreader Tips, 100 unités



6493

6491

© COLTENE – www.coltene.com

Mentions légales / Éditeur

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Coordonnées du service commercial

Coltene/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
FR-59260 Lezennes
+33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com

Centre de services

Du lundi au vendredi
08h00 - 17h00 | service@coltene.com | 00 800 11 0000 12 (UIFN)

COLTENE