

# HySolate Liquid Dam

Mode d'emploi

FR

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La digue liquide HySolate Liquid Dam est un composite microhybride fluide photopolymérisable visible destiné à la protection de la gencive adjacente aux dents en cours d'éclaircissement.

## UTILISATION PRÉVUE / BÉNÉFICE CLINIQUE

Protection de la gencive pendant les procédures d'éclaircissement

## PERFORMANCES

Les performances du produit sont conformes aux exigences pour l'utilisation prévue.

## CONTRE-INDICATIONS

Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité aux composants d'HySolate Liquid Dam.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### REMARQUE

- Les aiguilles d'application sont à usage unique.
- La lumière ambiante peut initier la polymérisation du matériau.
- N'utiliser aucune résine pour modifier la viscosité du matériau.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Le matériau non polymérisé peut avoir un effet irritant et provoquer une sensibilité aux méthacrylates.
- Les agents contenant de l'eugénol pourraient gêner la polymérisation de la digue liquide HySolate Liquid Dam.
- Les gants à usage médical en vente sur le marché ne protègent pas contre l'effet sensibilisant des méthacrylates.
- Tenir hors de portée des enfants.

## GRUPE D'UTILISATEURS / DE PATIENTS

L'utilisation de ce produit est exclusivement réservée aux professionnels dentaires qualifiés. Convient à tous les groupes de patients.

## UTILISATION CONFORME

Isoler la gencive avec des rouleaux de coton et une compresse. Appliquer la digue liquide HySolate Liquid Dam directement avec la seringue le long de la limite gingivale en utilisant les aiguilles d'application fournies. La couche de matériau doit avoir une épaisseur minimale de 1 à 1,5 mm. Photopolymériser le matériau pendant 10 secondes par arcade avec une lampe à polymériser en vente sur le marché (plage de longueur d'onde de 400 à 500 nm, intensité lumineuse d'au moins 1000 mW/cm<sup>2</sup>). Tenir la fenêtre d'émission de la lumière aussi près que possible du matériau. Une fois la procédure d'éclaircissement achevée, retirer HySolate Liquid Dam avec une spatule ou une précelle.

## DURÉE DE VIE / STOCKAGE

Ne pas conserver à une température dépassant 25 °C (77 °F). Protéger du rayonnement solaire direct. Ne pas utiliser ce produit après la date limite d'utilisation. Refermer la seringue immédiatement après usage pour éviter l'exposition du matériau à la lumière.

## ÉLIMINATION

Éliminer les déchets du produit conformément à la législation en vigueur.

## OBLIGATION DE SIGNALEMENT

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent impérativement être signalés sans délai au fabricant et aux autorités compétentes.

## GARANTIE

P. L. Superior Dental Materials GmbH garantit l'absence de défauts de matériau et de fabrication de ce produit. P. L. Superior Dental Materials GmbH exclut toute autre garantie, y compris la garantie tacite de valeur marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit est adapté à l'application qu'il envisage. Si le produit se révèle défectueux pendant la période de garantie, le seul recours de l'utilisateur et la seule obligation de P.L. Superior Dental Materials GmbH est la réparation ou le remplacement du produit.

## LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ


Sauf si la loi l'interdit, P.L. Superior Dental Materials GmbH décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage découlant de ce produit, qu'elle/il soit direct(e), indirect(e), spécial(e) ou accessoire, quel que soit l'argument avancé, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité absolue.


## SAFETY DATA SHEET

[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

Glossary	
	Consult instructions for use
	Marking of Conformity Europe
	Medical Device
	Legal Manufacturer
	Swiss Authorized Representative
	Distributor
	Reference Number
	Expiry Date
	Batch Code
	Unique Device Identifier
	Single use only
	Keep away from sun light
	Temperature limitation



P. L. Superior Dental Materials GmbH   
 Stiller Weg 15 A  
 22607 Hamburg, Germany

Coltene/Whaledent AG   
 Feldwiesenstrasse 20  
 CH-9450 Altstätten

Customer Center  
[service@coltene.com](mailto:service@coltene.com)