

# Adhesive AC

## Mode d'emploi

FR

### Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

#### Description du produit

Coltène Adhesive AC est un adhésif autoclavable à pulvériser pour le collage définitif des silicones polymérisés par addition et des porte-empreinte en plastique fabriqués avec des acrylates, du polystyrène ou des polycarbonates.

#### Utilisation prévue

Une mince couche de COLTENE Adhesive AC sert d'adhésif entre le matériau pour empreinte et le porte-empreinte. Il permet d'éviter le détachement du matériau pour empreinte du porte-empreinte au moment du retrait.

#### Composition

Principal composant : polydiméthylsiloxane

#### Indications

Utilisation en association avec des dispositifs médicaux.

#### Contre-indication

- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue au principal ingrédient de COLTENE Adhesive AC.
- COLTENE Adhesive AC n'est pas compatible avec les porte-empreinte en métal ni les porte-empreinte en plastique spécial. En cas de doute, il convient de tester l'acceptabilité.

#### Consignes de sécurité

##### **DANGER**

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 Peut provoquer une somnolence ou des vertiges.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Consulter un médecin.
- EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



GHS02 GHS07

##### **AVERTISSEMENT**

Contient de l'acétate d'éthyle.  
Utiliser exclusivement dans un endroit bien ventilé.  
Tenir à l'écart des sources d'ignition.  
Toujours porter des gants.  
L'utilisation de COLTENE Adhesive AC est réservée aux personnes spécialisées telles que le dentiste et l'assistant(e) dentaire ayant les qualifications spécifiques.

##### **REMARQUE**

En raison du caractère irréversible du collage entre les silicones polymérisés par addition et les porte-empreinte en plastique, il n'est plus possible d'utiliser les porte-empreinte en plastique recouverts de COLTENE Adhesive AC une fois l'empreinte prise.

#### Effets secondaires / Interactions

Aucune réaction indésirable ni aucun effet secondaire pour le patient et/ou le personnel dentaire n'ont été signalés.

#### Utilisateurs / Groupes de patients

L'application est effectuée par des professionnels dentaires. Convient à tous les groupes de patients.

#### USAGE NORMAL

Pulvériser (2-3 fois) de près une mince couche uniforme de Coltène Adhesive AC sur tous les porte-empreinte en plastique, puis laisser sécher pendant au moins 1 min ou sécher à l'air comprimé.

#### NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

##### Nettoyage du porte-empreinte

Les porte-empreinte en plastique jetables n'ont pas à être nettoyés.

##### Durée de conservation et stockage

COLTENE Adhesive AC est efficace au moins jusqu'à la date limite d'utilisation qui figure sur les récipients, dans un flacon fermé correctement et conservé à une température comprise entre 15 et 23 °C / 59 et 73 °F et à une humidité ambiante relative de 50 %. Durée de vie après la première ouverture : 3 mois.

#### Mise au rebut

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Peut être incinéré avec les ordures ménagères dans le cadre des règlements et après avoir pris contact avec la déchetterie et l'administration compétente.

#### Obligation de signalement

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent impérativement être signalés sans délai au fabricant et aux autorités compétentes.

For SDS see

[www.coltene.com](http://www.coltene.com)



#### Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Exclamation Mark



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG   
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
T +41 71 757 53 00  
F +41 71 757 53 01  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

 COLTENE