

CanalPro™

Protocole d'irrigation recommandé

Application d'une digue dentaire et désinfection de la dent avec **CanalPro NaOCl 3%**



Rinçage lors de la préparation avec **CanalPro NaOCl 3%** ou **6%**



Élimination de la boue dentinaire après la préparation : 1 min de rinçage avec **CanalPro EDTA 17%**



CanalPro NaOCl 3% ou 6%
(au moins 10 ml et 5 min)

Canal Pro CHX 2% (au moins 10 ml et 5 min)

CanalPro NaOCl 3% ou 6%
(au moins 10 ml et 5 min)



Neutralisation de **NaOCl** avec une solution de NaCl à 0,9 %/de l'alcool



Rinçage avec **CanalPro CHX 2%**
(au moins 10 ml et 5 min)



Séchage avec les **pointes de papier ROEKO / HyFlex** et/ou **Surgitip-endo ROEKO**



Obturation avec **ROEKO GuttaFlow2 / bioseal**

Important ! Suite à l'utilisation de **NaOCl** et avant le recours au **CHX**, le canal radiculaire doit être neutralisé par une irrigation intermédiaire (par ex. NaCl ou alcool). **Veillez noter :** le rinçage au NaCl est normalement recommandé avant la mesure de la longueur à l'aide de localisateurs d'apex.

CanalPro™ SyringeFill Références



CanalPro™ Distributeur de solution	RÉF.
CanalPro™ Distributeur de solution sur table (1 x support pour bouteille incl. base, 3 x bouchons pour station CanalPro)	60031347
CanalPro™ Distributeur de solution mural (1 x support mural pour bouteille, 3 x bouchons pour station CanalPro)	60031348
Bouchon pour station CanalPro™ (bouchon avec système luer lock intégré)	60019662
CanalPro™ Solutions d'irrigation	
CanalPro™ NaOCl 3%, 500 ml	60019655V
CanalPro™ NaOCl 6%, 500 ml	60019656V
CanalPro™ EDTA 17%, 500 ml	60019651
CanalPro™ EDTA 17%, 100 ml	60019654
CanalPro™ CHX 2%, 500 ml	60019658
CanalPro™ CHX 2%, 100 ml	60019659
CanalPro™ Seringues colorées	
CanalPro™ colour 5ml seringues rouges, 50 pcs.	60019321
CanalPro™ colour 5ml seringues bleues, 50 pcs.	60019322
CanalPro™ colour 5ml seringues jaunes, 50 pcs.	60019323
CanalPro™ colour 5ml seringues blanches, 50 pcs.	60019324
CanalPro™ colour 10ml seringues rouges, 50 pcs.	60011173
CanalPro™ colour 10ml seringues bleues, 50 pcs.	60011174
CanalPro™ colour 10ml seringues jaunes, 50 pcs.	60011175
CanalPro™ colour 10ml seringues blanches, 50 pcs.	60011176
Embouts d'irrigation	
CanalPro™ Slotted-End Tips 27 ga, 100 pcs.	60011167
CanalPro™ Slotted-End Tips 30 ga, 100 pcs.	60011168
CanalPro™ Side-Port Tips 27 ga, 100 pcs.	60011169
CanalPro™ Side-Port Tips 30 ga, 100 pcs.	60011170

 **COLTENE**

www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Allemagne
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
FR-59260 Lezennes
T +33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com