

Etchant Gel S

Mode d'emploi

FR

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Etchant Gel S est un gel de mordantage à l'acide phosphorique.

UTILISATION PRÉVUE

Etchant Gel S est utilisé pour le mordantage de l'émail et de la dentine dans le cadre de protocoles de collage dentaires.

COMPOSITION

Composant*	% en poids
Eau	40-55
Acide phosphorique	35-45
Silice amorphe	1-10
Ether monométhyllique de polyéthylène glycol	5-15

* Les composants présents en très faibles concentrations (< 1,0 %) ne sont pas énumérés

INDICATIONS

Restauration définitive des structures dures dans la bouche.

CONTRE-INDICATIONS

Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à au moins l'un des composants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Sécurité

- Provoque des brûlures par un acide.
- Tenir hors de portée des enfants !
- Pour des raisons d'hygiène, les aiguilles d'application sont à usage unique.
- Toujours porter des gants et des lunettes de protection (dentiste comme patient).
- Éviter tout contact entre Etchant Gel S et la gencive, la pulpe ou les dents adjacentes.
- En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, un rinçage à l'eau du robinet est suffisant. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau, puis consulter un ophtalmologue en lui montrant ce mode d'emploi.
- Contient des nanomatériaux (particules collées).

Risques résiduels

Les utilisateurs doivent avoir conscience que toute intervention dentaire dans la cavité buccale implique certains risques. Certains de ces risques sont :

- Perte de l'intégrité marginale ou de la restauration.
- Sensibilité postopératoire / irritation de la gencive / caries secondaires / complications endodontiques
- Décoloration / usure

EFFETS SECONDAIRES / INTERACTIONS

Il n'existe pas d'effets indésirables systémiques connus. En cas de contact avec l'émail mordancé et sec, la salive annulera l'effet adhésif du produit.

GROUPE D'UTILISATEURS / DE PATIENTS

L'utilisation de ce produit est exclusivement réservée aux professionnels dentaires qualifiés. Convient à tous les groupes de patients.

Remarque : ce produit n'a pas été spécifiquement évalué parmi les groupes de patients vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent.

PRÉPARATION

Nettoyage des surfaces dentaires

Nettoyer la dent à traiter ainsi que les dents adjacentes à

l'aide d'une brosse et d'une pâte prophylactique sans fluor.

Maintien du champ opératoire sec (digue dentaire)

Utiliser une digue dentaire (p. ex. de marque COLTENE) pour des raisons de sécurité et pour l'évacuation.

Préparation de la cavité

Conformément au principe de la technique de restauration adhésive. Si ceci est indiqué, il convient de placer une coiffe punctiforme près de la pulpe en utilisant un matériau adapté pour les coiffes pulpaire. En cas de contamination, finir l'émail avec une meuleuse diamantée.

UTILISATION CONFORME

Appliquer Etchant Gel S directement sur la surface à traiter avec l'aiguille d'application. Laisser l'agent de mordantage agir pendant 15 s sur l'émail et sur la dentine. Rincer ensuite abondamment avec de l'eau (pendant env. 20 s) jusqu'à l'élimination complète de toute trace d'Etchant Gel S. Sécher doucement à l'air comprimé exempt d'huile, en prenant soin de ne pas sécher excessivement la dentine. Poursuivre avec l'adhésif conformément au mode d'emploi du fabricant. L'émail mordancé prend un aspect blanc crayeux. Répéter la procédure de mordantage en cas de doute.

Remarque : utiliser du fluor sur l'émail qui a été mordancé et qui n'est pas recouvert de composite.

RETRAITEMENT, NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET MAINTENANCE

Pour la seringue, il est recommandé d'utiliser un manchon jetable. En cas de contamination suspectée ou identifiée, éliminer la seringue comme décrit ci-dessous.

La désinfection dans un laveur-désinfecteur et la stérilisation à la vapeur dans un autoclave ne sont pas possibles.

DURÉE DE VIE / STOCKAGE

Date limite d'utilisation et **LOT** : voir emballage primaire
Température de conservation : 4-23 °C / 39-73 °F
Durée de vie après la première ouverture : 3 mois
Protéger le produit contre toute exposition à la chaleur et au soleil. Éviter les fluctuations de température extrêmes.

ÉLIMINATION

Éliminer les déchets du produit conformément à la législation en vigueur. Des réglementations spécifiques à chaque pays peuvent s'appliquer. Ne jeter dans les ordures ménagères que les emballages totalement vides conformément à la réglementation officielle.

OBLIGATION DE SIGNALEMENT

Tous les incidents graves survenant en lien avec ce produit doivent impérativement être signalés sans délai au fabricant et aux autorités compétentes.

Dans le cas improbable d'une inhalation, d'une ingestion, d'un contact avec les yeux ou d'incidents similaires, consulter immédiatement un médecin spécialisé afin d'atténuer les dommages potentiels.

SAFETY DATA SHEET (SDS)
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



RX only



Medical Device



Legal Manufacturer



European Authorized Representative



Importer



Reference Number



Manufacturing Date



Expiry Date



Batch Code



Unique Device Identifier



Single use only



Keep away from sun light



Temperature limitation

**COLTENE International
Dental Group**

Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Made in Switzerland by
Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

Customer Center
service@coltene.com

COLTENE