

GI-MASK Universal Separator

Mode d'emploi

FR

Définition

GI-MASK Universal Separator est un liquide séparateur pour les silicones par addition et par condensation au laboratoire dentaire.

Type de matériau

Solution de résines de fluorocarbène en iso-hexane.

Indication

GI-MASK Universal Separator est utilisé pour le retrait facile du masque gingival de l'empreinte globale ou de la matrice en silicone.

Important

Toujours porter des gants.

Contre-indications

Si le produit est utilisé comme indiqué, il n'y a aucune contre-indication connue.


Application

- Vaporiser toute la surface de l'empreinte globale ou de la matrice en silicone de façon homogène avec GI-Mask Universal Separator. Veiller à réaliser cette procédure dans une pièce bien ventilée.
- Laisser sécher à l'air pendant au moins 5 minutes.
- Utiliser le produit GI-MASK comme indiqué
- Dès que le produit GI-MASK est pris, retirer prudemment l'empreinte globale ou la matrice en silicone

Durée de conservation et stockage

GI-MASK Universal Separator doit être conservé à une température de 15-23°C/59-73°F et à une humidité relative de 50% dans un conteneur hermétique. GI-MASK Universal Separator conserve ses propriétés au moins jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

Inscriptions

La date d'expiration et le numéro de  sont indiqués sur l'emballage.

Pré cautions

Contient Hexane – mélange d'isomères, acétate d'isopropyle



GHS02



GHS07



GHS09



GHS08





DANGER

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H222+H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P261 Éviter de respirer les brouillards/ vapeurs/aérosols.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.
- P264 Laver tout le corps extérieur exposé soigneusement après manipulation.
- P301+P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/un secouriste.
- P331 NE PAS faire vomir.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/un secouriste en cas de malaise.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405 Garder sous clef.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux autorisé conformément à toute réglementation locale.

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com

Glossary

-  Consult instructions for use
-  Keep away from sun light
-  Temperature limitation
-  Expiry date

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

 COLTENE