

SISTEMA DI GUSCI DIRETTI IN COMPOSITO

BRILLIANT COMPONEER®

Per un sorriso brillante





BRILLIANT COMPONEER® Per un sorriso brillante

Restauri estetici dei denti anteriori in un'unica seduta

BRILLIANT COMPONEER è un sistema di gusci in composito preformati per il restauro estetico dei denti anteriori. Questo sistema ben concepito unisce i vantaggi del restauro diretto ai vantaggi della tecnica a gusci indiretti. In questo modo è possibile eseguire singole correzioni con la

stessa semplicità ed efficienza di restauri completi del settore anteriore. I gusci sono disponibili in diverse misure e colori smalto e possono essere personalizzati con la massima semplicità.

Per il paziente questo significa un sorriso brillante in un'unica seduta.

Composito brillante

I gusci in smalto si basano sull'affermata tecnologia submicronica del riempitivo BRILLIANT EverGlow e vengono realizzati industrialmente. Grazie alla sofisticata composizione con speciali riempitivi, il materiale si distingue nel complesso per l'elevato mantenimento della brillantezza nel tempo.

Nello stesso tempo, i gusci stessi assicurano brillanti risultati grazie alla straordinaria stabilità anche con uno spessore di soli 0,3 mm. La superficie straordinariamente liscia di BRILLIANT COMPONEER può essere lucidata a specchio in un batter d'occhio.



Cementazione coordinata e completa

Per la cementazione dei gusci BRILLIANT COMPONEER è sufficiente applicare uno strato del composito universale BRILLIANT EverGlow. L'impiego dello stesso materiale di base consente di creare un legame solido e omogeneo, che rappresenta la base ideale per un restauro affidabile. La morbida consistenza

e l'eccezionale bagnabilità di BRILLIANT EverGlow assicurano una gradevole praticità d'uso dei gusci BRILLIANT COMPONEER.

Un adesivo perfettamente calibrato e pratici strumenti ausiliari per il posizionamento e la modellazione dei gusci completano il sistema.

- Restauri estetici di qualità dei denti anteriori
- Restauro mininvasivo su base in composito
- Tutto in un'unica seduta – nessun intervento del laboratorio
- Brillantezza di lunga durata grazie all'eccezionale lucidabilità
- Convenienza elevata per studio e paziente

Due colori dello smalto traslucenti per la caratterizzazione individuale

BRILLIANT COMPONEER
Bleach Translucent




BRILLIANT COMPONEER
Translucent



Brillantezza che dura nel tempo, preparazione mininvasiva della sostanza dentale

Preparazione mininvasiva

L'esclusivo processo di produzione dei gusci BRILLIANT COMPONEER consente di realizzare spessori estremamente sottili, a partire da 0,3 mm. Ciò consente una preparazione mininvasiva, che preserva la sostanza dentale esistente. Allo stesso tempo, i gusci in composito prodotti industrialmente mostrano una straordinaria caratteristica di omogeneità e stabilità.

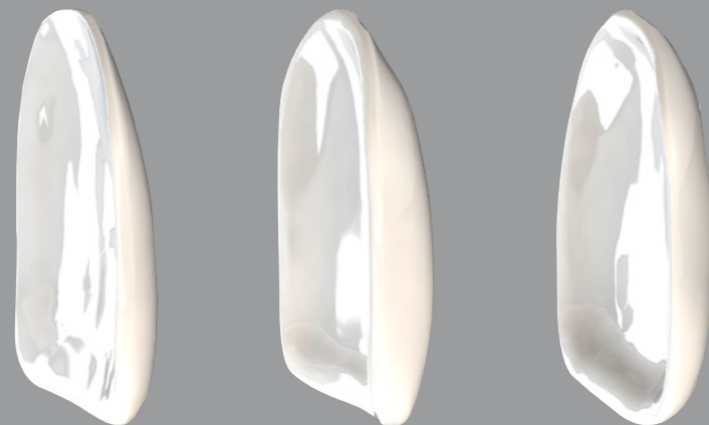

BRILLIANT COMPONEER

Prodotto della concorrenza A


Prodotto della concorrenza B

Fonte: Misurazioni delle unità IM-TECHNOLOGY AG, Svizzera

Eccellente capacità di rivestimento estetico

Tutti i prodotti della linea compositi BRILLIANT sorprendono per l'eccellente capacità di rivestimento estetico. In questo modo è possibile integrare i gusci Componeer in modo discreto. Anche la scelta della tinta adatta con il composito di cementazione BRILLIANT EverGlow

diventa un gioco da ragazzi, grazie al pratico concetto cromatico "Duo Shade" con doppi colori quali A1/B1 o A2/B2. Inoltre, la sfumatura cromatica naturale del dente viene sapientemente riprodotta attraverso lo spessore progressivo dei gusci traslucidi verso il margine incisale.

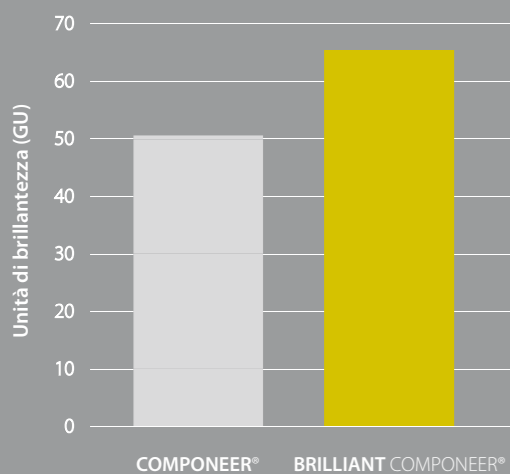

Fonte: dati interni

Mantenimento della brillantezza e stabilità cromatica a lungo termine

Pioniere nella terapia con riempitivi estetici, COLTENE è sempre stato sinonimo di soluzioni pratiche e innovative. I gusci BRILLIANT COMPONEER vengono prepolimerizzati in un processo di produzione sviluppato internamente. Grazie alla sofisticata composizione del riempitivo, i gusci in composito presentano una superficie straordinariamente satinata e si distinguono inoltre per il mantenimento della brillantezza nel tempo e l'alto grado di stabilità del colore. Il risultato è un'impressione di permanente bellezza!

Un confronto tra la classica serie COMPONEER e BRILLIANT COMPONEER nel simulatore di spazzolamento mostra il migliore mantenimento della brillantezza sotto carico intensivo permanente con oltre 20'000 movimenti.

Straordinaria adesione grazie alla micro-ritenzione

L'esclusiva superficie interna micro-ritentiva di BRILLIANT COMPONEER ne aumenta significativamente la bagnabilità e garantisce un'adesione di lunga durata. In questo modo si ottiene una forza di adesione molto più elevata di quanto sarebbe possibile, ad esempio, con i classici gusci in ceramica.




Lunga durata grazie all'elasticità simile a quella della dentina

In corrispondenza dell'interfaccia adesiva tra dente e materiale di restauro, sotto carico si generano forze di trazione elevate. Grazie al modulo di elasticità dei gusci BRILLIANT COMPONEER, simile a quello della dentina, le tensioni rimangono contenute.

In questo modo si evita la formazione di incrinature, crepe o distacchi - la base ottimale per restauri particolarmente duraturi.

Modulo E: 9,8 GPa
Resistenza a flessione 125 MPa

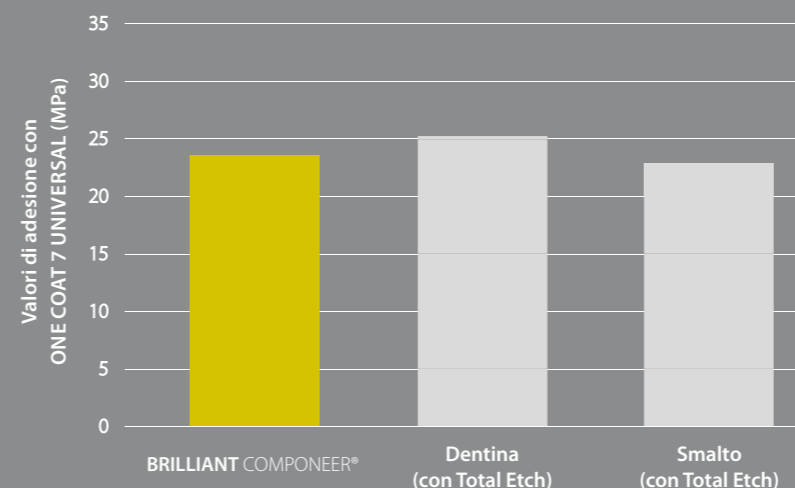

Fonte: dati interni

Affidabile cementazione alla sostanza dentale

ONE COAT 7 UNIVERSAL è il partner perfetto per la cementazione dei gusci BRILLIANT COMPONEER. L'adesivo monocomponente fotopolimerizzabile può essere utilizzato in tutte le tecniche più comuni: si tratti di automordenzatura, mordenzatura selettiva o mordenzatura totale, ONE COAT 7 UNIVERSAL presenta eccezionali valori di adesione in qualsiasi situazione.

Il vantaggio in più per i vostri pazienti...

I pazienti informati sanno ciò che vogliono

Un sorriso radioso e sicuro apre molte porte, sia al lavoro che nella vita privata. I vostri pazienti vogliono brillare nella vita e migliorare costantemente il proprio aspetto. La soluzione ideale è eseguire piccole correzioni in

modo semplice e rapido, senza inutili interruzioni delle attività quotidiane. Allo stesso tempo, i clienti ben informati si aspettano un interessante rapporto qualità-prezzo.



I gusci BRILLIANT COMPONEER convincono i pazienti più esigenti grazie a:

- Risultati estetici
- Elevato mantenimento della brillantezza nel tempo e lunga durata
- Buona qualità a prezzi convenienti
- Soluzione rapida in un'unica seduta
- Preparazione mininvasiva e atraumatica della sostanza dentale
- Nessun coinvolgimento del laboratorio, nessuna presa d'impronta o fastidiosi provvisori

... e per il vostro studio

I moderni studi odontoiatrici si distinguono per i trattamenti innovativi

È possibile gestire il proprio studio in modo economico e secondo i più recenti standard professionali. Opzioni di trattamento innovative entusiasmano i pazienti e vi permettono di essere sempre

un passo avanti rispetto alla concorrenza. I vostri clienti apprezzano la consulenza competente in grado di proporre il trattamento ottimale e sono felici di trovare soluzioni interessanti e personalizzate.

Il sistema di gusci diretti in composito presenta svariati vantaggi anche per lo studio dentistico:

- Risultati estetici che durano nel tempo
- Maggiore efficienza rispetto al restauro in composito diretto
- Procedura mininvasiva rispetto alla tecnica con gusci indiretti
- Convenienza elevata nell'impiego quotidiano
- Nessuna presa d'impronta, nessun intervento del laboratorio
- Sistema di compositi perfettamente armonizzati tra loro
- Svariate opportunità d'impiego per una serie di classiche indicazioni
 - Restauro e rivestimento di difetti dovuti a carie
 - Rivestimento di vecchi restauri
 - Ricostruzione di sostanza dentale andata perduta
 - Restauro di fratture dentali
 - Allungamento dei margini incisali
 - Correzioni cosmetiche di discromie e difetti di posizione
 - Correzione di malformazioni anatomiche
 - Chiusura di diastemi



«I miei pazienti amano il loro nuovo sorriso. Spesso si stupiscono di come oggi i dentisti possano realizzare soluzioni di alta qualità in modo rapido ed economico. I gusci BRILLIANT COMPONEER sono in grado di calcolare da solo tutti i costi in modo economico, senza l'intervento di un laboratorio o altre stazioni intermedie.»

Dr. med. dent. Mario Besek, Svizzera




BRILLIANT COMPONEER®

In pochi passaggi al risultato perfetto



1 Situazione iniziale: denti anteriori con vecchi restauri discromici

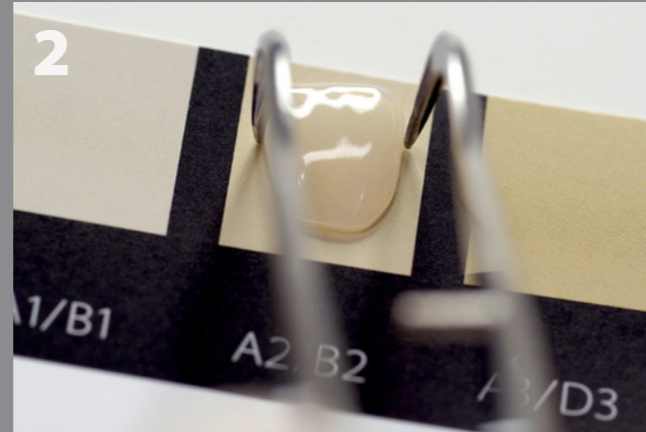


2 Scelta del colore: con l'ausilio della Shade Guide si determina il colore dei gusci BRILLIANT COMPONEER e del materiale di cementazione.



3 Scelta della misura: dopo la preparazione, si definisce la misura appropriata con l'ausilio della ContourGuide trasparente.



4 Bonding: si applica ONE COAT 7 UNIVERSAL previa esecuzione della tecnica Totaletch.

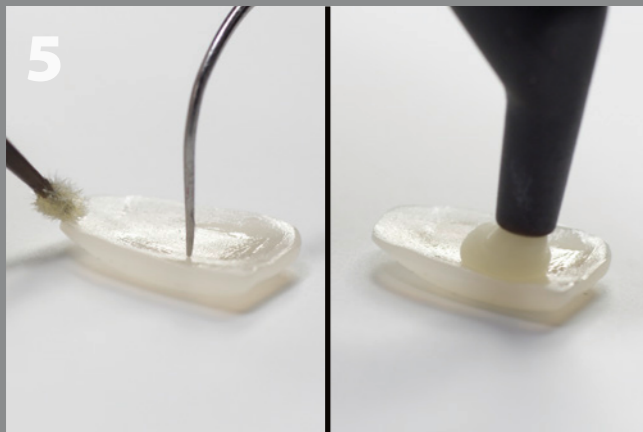

5 Preparazione: si applicano ONE COAT 7 UNIVERSAL e BRILLIANT EverGlow per la cementazione.



6 Posizionamento: BRILLIANT COMPONEER viene applicato sul dente e poi polimerizzato.



7 Lucidatura: una breve lucidatura esalta ancora di più la brillantezza intrinseca del materiale.



8 Il risultato è un sorriso brillante dopo due settimane dal trattamento.

TIP

Dalla pratica clinica: soluzioni individuali come i vostri pazienti

La personalizzazione dei gusci BRILLIANT COMPONEER è semplice. Utilizzando un dischetto, è possibile rielaborare la forma anatomica di base secondo le esigenze del paziente e accentuare la struttura della superficie labiale con una fresa diamantata a grana fine.



VEDERE IL VIDEO COMPLETO



www.componeer.info

TIP

Dalla pratica clinica: semplice riparazione

Come per tutti i restauri a base di composito, anche in questo caso è possibile eseguire piccole correzioni in qualsiasi momento: poiché BRILLIANT COMPONEER e BRILLIANT EverGlow presentano la stessa base in composito, i gusci possono essere facilmente fissati con il composito universale e riparati in un secondo momento.

INFORMAZIONI PER ORDINARE

Set BRILLIANT COMPONEER

Contenuto			REF							
			Bleach Translucent ¹				Translucent ²			
			S	M	L	XL	S	M	L	XL
Set BRILLIANT COMPONEER arcata superiore	6 pz.	11, 12, 13, 21, 22, 23	60023198	60023200	60023201	60023203	60023204	60023206	60023207	60023209
Set BRILLIANT COMPONEER arcata superiore premolare	2 pz.	14, 24	60023194	-	60023195	-	60023196	-	60023197	-
Set BRILLIANT COMPONEER arcata inferiore	6 pz.	31, 32, 33, 41, 42, 43	60023210	60023211	-	-	60023212	60023213	-	-


Refill BRILLIANT COMPONEER

Contenuto			REF							
			Bleach Translucent ¹				Translucent ²			
			S	M	L	XL	S	M	L	XL
Arcata superiore	11	1 pz.	60023122	60023128	60023134	60023140	60023158	60023164	60023170	60023176
	12	1 pz.	60023123	60023129	60023135	60023141	60023159	60023165	60023171	60023177
	13	1 pz.	60023124	60023130	60023136	60023142	60023160	60023166	60023172	60023178
	21	1 pz.	60023125	60023131	60023137	60023143	60023161	60023167	60023173	60023179
	22	1 pz.	60023126	60023132	60023138	60023144	60023162	60023168	60023174	60023180
	23	1 pz.	60023127	60023133	60023139	60023145	60023163	60023169	60023175	60023181
Arcata inferiore	31	1 pz.	60023146	60023152	-	-	60023182	60023188	-	-
	32	1 pz.	60023147	60023153	-	-	60023183	60023189	-	-
	33	1 pz.	60023148	60023154	-	-	60023184	60023190	-	-
	41	1 pz.	60023149	60023155	-	-	60023185	60023191	-	-
	42	1 pz.	60023150	60023156	-	-	60023186	60023192	-	-
	43	1 pz.	60023151	60023157	-	-	60023187	60023193	-	-

Arcata superiore						
FDI	13	12	11	21	22	23

Arcata superiore		
FDI	14	24

Arcata inferiore						
FDI	43	42	41	31	32	33

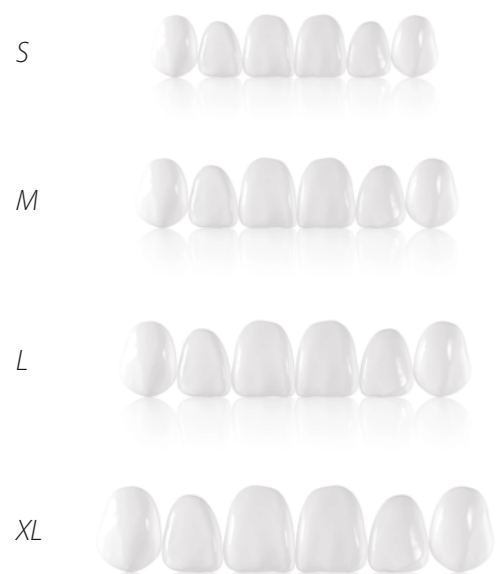

¹ Il nuovo colore Translucent corrisponde al precedente colore COMPONEER Universal
² Il nuovo colore Bleach Translucent corrisponde al precedente colore COMPONEER White Opalescent

KIT BRILLIANT COMPONEER siringhe

REF	Articolo	Accessori
60023214	Kit Intro siringhe	
		25 x Spazzolini COMPONEER 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata inferiore M 1 x Posizionatore 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata inferiore S 1 x Etchant Gel S 1 x Strumento di modellazione MBC 2 x Adattatore posizionatore 10 x Timbro posizionatore 1 x Gommino in silicone 2303RA 1 x Gommino in silicone 2311RA 1 x Gommino in silicone 2403RA 1 x Gommino in silicone 2411RA 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata superiore L 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata superiore M 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata superiore S 1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A1/B1 1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A2/B2 1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans) 1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans) 1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL 1 x 20 pz. Aghi per applicazione 1 x Shade Guide BRILLIANT COMPONEER
1 x 6	Gusci arcata superiore, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Gusci arcata superiore, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 6	Gusci arcata superiore, Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Gusci arcata superiore, Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 2	Gusci arcata superiore premolare, Bleach Translucent, L, 14/24	
1 x 2	Gusci arcata superiore premolare, Translucent, L, 14/24	



KIT BRILLIANT COMPONEER puntali

REF	Articolo	Accessori
60023215	Kit Intro puntali	
		25 x Spazzolini COMPONEER 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata inferiore M 1 x Posizionatore 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata inferiore S 1 x Etchant Gel S 1 x Strumento di modellazione MBC 2 x Adattatore posizionatore 10 x Timbro posizionatore 1 x Gommino in silicone 2303RA 1 x Gommino in silicone 2311RA 1 x Gommino in silicone 2403RA 1 x Gommino in silicone 2411RA 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata superiore L 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata superiore M 1 x Contour Guide COMPONEER - arcata superiore S 8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A1/B1 8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A2/B2 8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans) 8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans) 1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL 1 x 20 pz. Aghi per applicazione 1 x Shade Guide BRILLIANT COMPONEER
1 x 6	Gusci arcata superiore, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Gusci arcata superiore, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 6	Gusci arcata superiore, Translucent, M, 11-13/21-23	
1 x 6	Gusci arcata superiore, Translucent, L, 11-13/21-23	
1 x 2	Gusci arcata superiore premolare, Bleach Translucent, L, 14/24	
1 x 2	Gusci arcata superiore premolare, Translucent, L, 14/24	



Per ulteriori informazioni relative a forme e misure, visitare la nostra homepage all'indirizzo www.componeer.info



Nel mio studio eseguo quasi ogni settimana un restauro con BRILLIANT COMPONEER. Nei miei workshop sono sempre stupita della rapidità con cui i nuovi utilizzatori imparano a usare questi gusci in composito, grazie alla loro semplicità di lavorazione.

In brevissimo tempo sono in grado di realizzare praticamente da soli anche restauri dei denti anteriori, estremamente impegnativi in termini estetici.

Dr. med. dent. Patrizia Lucchi, Italia

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


Le preparazioni mininvasive rappresentano per me la base di qualsiasi soluzione terapeutica durevole. I gusci in composito relativamente sottili ed estremamente stabili mi permettono di asportare soltanto una minima quantità di sostanza dentale sana e possono quindi essere utilizzati in modo semplice e rapido in svariate indicazioni.

Dr. med. dent. Sylvia Rahm, Germania



© COLTENE – www.coltene.com



Coltène Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italia
T + 39 0362 62 67 32
F + 39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Svizzera
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com



LINK PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



www.componeer.info

 **COLTENE**