

Adhesive

Informazioni per l'uso

IT

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Descrizione del prodotto

COLTENE Adhesive è un adesivo universale per materiali da impronta dentale a base siliconica. Può essere utilizzato con tutti i portaimpronta convenzionali (ad es. metallici).

Uso previsto

Uno strato sottile di COLTENE Adhesive funge da adesivo tra il materiale da impronta e il portaimpronta. Evita il distacco del materiale da impronta dal portaimpronta al momento dell'estrazione.

Composizione

Componente principale: polisilossano

Indicazioni

Utilizzato in combinazione con dispositivi medici.

Controindicazioni

Non utilizzare in presenza di allergie note all'ingrediente principale di COLTENE Adhesive.

Istruzioni per la sicurezza

⚠️ PERICOLO

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
- P273 Non disperdere nell'ambiente.
- P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare acqua nebulizzata, anidride carbonica o schiuma resistente all'alcol per estinguere.
- P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un luogo sicuro.



GHS02 GHS09

⚠️ AVVERTIMENTO

Contiene esametildisilossano

Utilizzare soltanto in luoghi ben ventilati!

Tenere lontano da fonti di accensione!

Indossare sempre i guanti.

Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso!

COLTENE Adhesive può essere utilizzato solo da personale specializzato, come dentisti e assistenti dentali con particolari qualifiche.

Effetti collaterali / interazioni

Non sono noti effetti secondari o reazioni nocive per i pazienti e/o il personale odontoiatrico.

Utilizzatori / gruppi di pazienti

L'applicazione viene eseguita da professionisti odontoiatrici. Idoneo per tutti i gruppi di pazienti.

USO CORRETTO

Pennellare tutti i portaimpronta con uno strato di Coltène Adhesive quanto più sottile possibile e lasciare asciugare lo strato così applicato per almeno 1 minuto oppure asciugare con aria compressa. Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso!

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulizia dei portaimpronta

Il materiale per impronta può essere rimosso con uno strumento non appuntito. L'immersione in un solvente universale o etere di petrolio scioglie l'adesivo COLTENE Adhesive. Usare i solventi solo in locali ben aerati.

Pulire il portaimpronta come al solito e quindi disinfettarlo. I portaimpronta monouso in plastica non devono essere puliti.

Stoccaggio e scadenza

COLTENE Adhesive soddisfa lo scopo previsto fino alla data di scadenza indicata sul contenitore, in un flacone chiuso correttamente, a una temperatura di 15-23°C e umidità relativa del 50%. Conservazione dopo la prima apertura: 3 mesi.

Smaltimento

Smaltimento secondo le norme delle autorità locali. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Può essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione dell'autorità competente.

Obbligo di segnalazione

Tutti gli incidenti gravi che si verificano con questo prodotto devono essere immediatamente segnalati al fabbricante e all'autorità competente.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Temperature limitation



Marking of Conformity Europe



Identification for Russia



Identification for Ukraine



Legal Manufacturer



Importer



Expiry Date



RX only



European Authorized Representative



Flame



Environment



Batch Code



Medical Device



Reference Number



Unique Device Identifier

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

 COLTENE