

ROEKO Retracto / roEKO Stay-put

Istruzioni per l'uso

IT

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I fili di retrazione sono utilizzati per esporre il solco gengivale prima della presa d'impronta di un'arcata.

2. USO PREVISTO

I fili di retrazione Roeko sono destinati ad aprire il solco e a prevenire eventuali sanguinamenti grazie alla pressione risultante sul tessuto.

3. COMPOSIZIONE

ROEKO Retracto

Filo di cotone intrecciato o ritorto non impregnato.

ROEKO Stay-put

Filo di cotone intrecciato non impregnato in cui è intrecciato un filo di rame (avvolto con fili di nylon).

4. INDICAZIONI PER L'USO / BENEFICIO CLINICO

Retrazione temporanea del margine gengivale.

5. CONTROINDICAZIONI

Non sono note controindicazioni.

6. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

⚠️ AVVERTIMENTO

In relazione a ROEKO Stay-put: Evitare di toccare il filo con apparecchiature laser e per elettrotomia.

Tenere i dispositivi medici fuori della portata dei bambini.

7. EFFETTI COLLATERALI / INTERAZIONI

Non sono noti effetti secondari o reazioni dannose per i pazienti e/o il personale odontoiatrico.

8. GRUPPI DI PAZIENTI / UTILIZZATORI

Gli utilizzatori previsti sono gli odontoiatri (dentista) e gli assistenti dentali (infermiere dentale). Il prodotto/la famiglia di prodotti è idoneo/a per tutti i gruppi di pazienti.

9. PREPARAZIONE

Tagliare il filo di retrazione alla lunghezza desiderata. Retracto e Stay-put possono essere immersi in comuni soluzioni di retrazione gengivale. Rispettare le istruzioni per l'uso del liquido prescelto.

10. USO CORRETTO

Posizionare il centro del filo all'interno del solco. Successivamente lavorare in direzione delle estremità del filo. Non è necessaria alcuna sovrapposizione. Lasciare il filo nel solco, se non impregnato, per almeno 5 minuti. Se si utilizza un comune liquido emostatico, seguire le istruzioni per l'uso del liquido riguardanti il tempo di applicazione. Rimuovere il filo subito prima della presa dell'impronta.

11. METODI DI PROVA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE

Esame visivo, il solco deve essere visivamente molto più largo.

12. DURATA / CONSERVAZIONE

Vedere la data di scadenza e i simboli di stoccaggio riportati sulla confezione. Conservare la confezione contenente il filo in un luogo asciutto.

13. SMALTIMENTO

Il prodotto può essere smaltito nei rifiuti domestici. Possono applicarsi specifiche normative nazionali.

14. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Tutti gli incidenti gravi che si verificano con questo prodotto devono essere immediatamente segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui è registrato l'operatore e/o il paziente.



Glossary



Consult instructions for use



Single use only



Keep dry



Marking of Conformity Europe



Legal Manufacturer



Expiry Date



Batch Code



Restricted device for professional use only



Medical Device

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany

www.coltene.com

Customer Center
service@coltene.com