

Adhesive AC

Instruções de Utilização

PT

Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar o produto. Guardar para consulta posterior.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COLTENE Adhesive AC é um agente adesivo pulverizável autoclavável para a união duradoura entre silicões reticuláveis por adição e moldeiras de impressão de plástico feitas de acrilatos, poliestireno, ou policarbonatos.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Uma fina camada de COLTENE Adhesive AC serve como adesivo entre o material de impressão e a moldeira. Ela impede que o material de impressão se destaque da moldeira de impressão durante a remoção.

COMPOSIÇÃO

Componente principal: copolímero polidimetilssiloxano

INDICAÇÕES

- Sem indicações médicas diretas.
- Utilizado em combinação com dispositivos médicos.

CONTRAINDICAÇÃO

- Não utilizar em caso de alergias conhecidas ao componente principal do COLTENE Adhesive AC.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Usar apenas em áreas bem ventiladas!
- Manter afastado de fontes de ignição!
- Usar sempre luvas.
- A utilização de COLTENE Adhesive AC só pode ser feita por pessoal especializado, como dentistas e assistentes dentários com qualificações especiais.
- Devido à união irreversível entre os silicões reticuláveis por adição e as moldeiras de impressão de plástico, as moldeiras de plástico pulverizadas com COLTENE Adhesive AC deixam de poder ser utilizadas após a tomada de impressão.
- COLTENE Adhesive AC não é compatível para utilização com moldeiras metálicas ou moldeiras de impressão de plástico especiais. Em caso de dúvida, verificar a aceitabilidade.

EFEITOS SECUNDÁRIOS/INTERAÇÕES

Desconhecem-se reações nefastas ou efeitos secundários em pacientes e/ou no pessoal da área odontológica.

GRUPOS DE UTILIZADORES/PACIENTES

O produto só deve ser usado por profissionais na área da odontologia. Indicado para todos os grupos de pacientes, incluindo crianças, idosos e grávidas.

UTILIZAÇÃO DEVIDA

Pulverizar as moldeiras de impressão de plástico, a curta distância, com uma camada fina e homogênea de COLTENE Adhesive AC (2 – 3 vezes) e deixar secar, pelo menos, durante 1 minuto ou secar diretamente com ar comprimido.

REPROCESSAMENTO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO

Limpeza das moldeiras

As moldeiras de impressão de plástico descartáveis não se destinam a ser limpas.

DURABILIDADE / ARMAZENAMENTO

O COLTENE Adhesive AC cumpre o fim para que foi concebido, pelo menos, durante o seu período de validade indicado nas embalagens, em frascos bem selados e a uma temperatura de 15 – 23 °C / 59 - 73 °F e 50% de humidade relativa do ar. Durabilidade depois da primeira abertura: 3 meses.

ELIMINAÇÃO

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Pode ser queimado em conjunto

com lixo doméstico, sob consideração das instruções e consulta com os responsáveis e com os serviços públicos.

OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Todos os incidentes graves ocorridos em conjugação com este produto têm de ser imediatamente comunicados ao fabricante e às autoridades competentes.

No caso improvável de inalação, ingestão, contacto com os olhos ou incidentes do género, procurar imediatamente ajuda médica de um especialista para mitigar eventuais malefícios.

SAFETY DATA SHEET
www.coltene.com



| Glossary | |
|----------|------------------------------------|
| | Consult instructions for use |
| | Keep away from sun light |
| | Temperature limitation |
| | Marking of Conformity Europe |
| | Identification for Ukraine |
| | Legal Manufacturer |
| | Expiry Date |
| | Batch Code |
| | Rx only |
| | Medical Device |
| | Manufacturing Date |
| | Unique Device Identifier |
| | European Authorized Representative |
| | Importer |
| | Reference Number |

COLTENE International Dental Group

Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Made in Switzerland by
Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

Customer Center
service@coltene.com

COLTENE