

# Adhesive

## Instruções de Utilização

PT

Leia atentamente as instruções de utilização antes de usar o produto. Guardar para consulta posterior.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O COLTENE Adhesive é um adesivo universal para materiais de impressão à base de silicone para utilização em odontologia. Pode ser utilizado para todas as moldeiras de impressão convencionais (por ex., metálicas).

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

Uma fina camada de COLTENE Adhesive serve como adesivo entre o material de impressão e a moldeira de impressão. Ela impede que o material de impressão se destaque da moldeira de impressão durante a remoção.

### COMPOSIÇÃO

Componente principal: polissiloxano

### INDICAÇÕES

- Sem indicações médicas diretas.
- Utilizado em combinação com dispositivos médicos.

### CONTRAINDICAÇÃO

- Não utilizar em caso de alergias conhecidas ao componente principal do COLTENE Adhesive.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Usar apenas em áreas bem ventiladas!
- Manter afastado de fontes de ignição!
- Usar sempre luvas.
- Feche o frasco imediatamente após a utilização.
- A utilização de COLTENE Adhesive só pode ser feita por pessoal especializado, como dentistas e assistentes dentários com qualificações especiais.

### EFEITOS SECUNDÁRIOS/INTERAÇÕES

Desconhecem-se reações nefastas ou efeitos secundários em pacientes e/ou no pessoal da área odontológica.

### GRUPOS DE UTILIZADORES/PACIENTES

O produto só deve ser usado por profissionais na área da odontologia. Indicado para todos os grupos de pacientes, incluindo crianças, idosos e grávidas.

### UTILIZAÇÃO DEVIDA

Revista todas as moldeiras com uma camada o mais fina possível de COLTENE Adhesive e deixe-a secar, pelo menos, 1 min, ou seque-a com ar comprimido.

Feche o frasco imediatamente após a utilização.

### REPROCESSAMENTO, LIMPEZA, DESINFEÇÃO E MANUTENÇÃO

#### Limpeza das moldeiras

O material de impressão pode ser removido com um instrumento rombo. A imersão num solvente ou benzina universal à venda no mercado dissolverá o COLTENE Adhesive. Estes solventes devem ser utilizados apenas em espaços bem ventilados. As moldeiras podem ser limpas e desinfetadas como habitualmente.

### DURABILIDADE / ARMAZENAMENTO

COLTENE Adhesive cumpre a sua finalidade, pelo menos, até à data de expiração, indicada nos recipientes, em frascos devidamente vedados, a temperaturas de 15-23 °C / 59-73 °F e 50% de humidade relativa do ar. Durabilidade depois da primeira abertura: 3 meses.

### ELIMINAÇÃO

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Pode ser queimado em conjunto com lixo doméstico, sob consideração das instruções e consulta com os responsáveis e com os serviços públicos.

### OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Todos os incidentes graves ocorridos em conjugação com este produto têm de ser imediatamente comunicados ao fabricante e às autoridades competentes.

No caso improvável de inalação, ingestão, contacto com os olhos ou incidentes do género, procurar imediatamente ajuda médica de um especialista para mitigar eventuais malefícios.

SAFETY DATA SHEET  
www.coltene.com



Glossary	
	Consult instructions for use
	Keep away from sun light
	Temperature limitation
	Marking of Conformity Europe
	Identification for Ukraine
	Legal Manufacturer
	Expiry Date
	Batch Code
	RX only
	Medical Device
	Manufacturing Date
	Unique Device Identifier
	European Authorized Representative
	Importer
	Reference Number

COLTENE International Dental Group

Dent4You AG  
Bahnhofstrasse 2  
CH-9435 Heerbrugg

Made in Switzerland by  
Coltène/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten

Customer Center  
service@coltene.com