


**BRILLIANT**  
New Line

Compósito Nano-Híbrido Universal Duo Shade

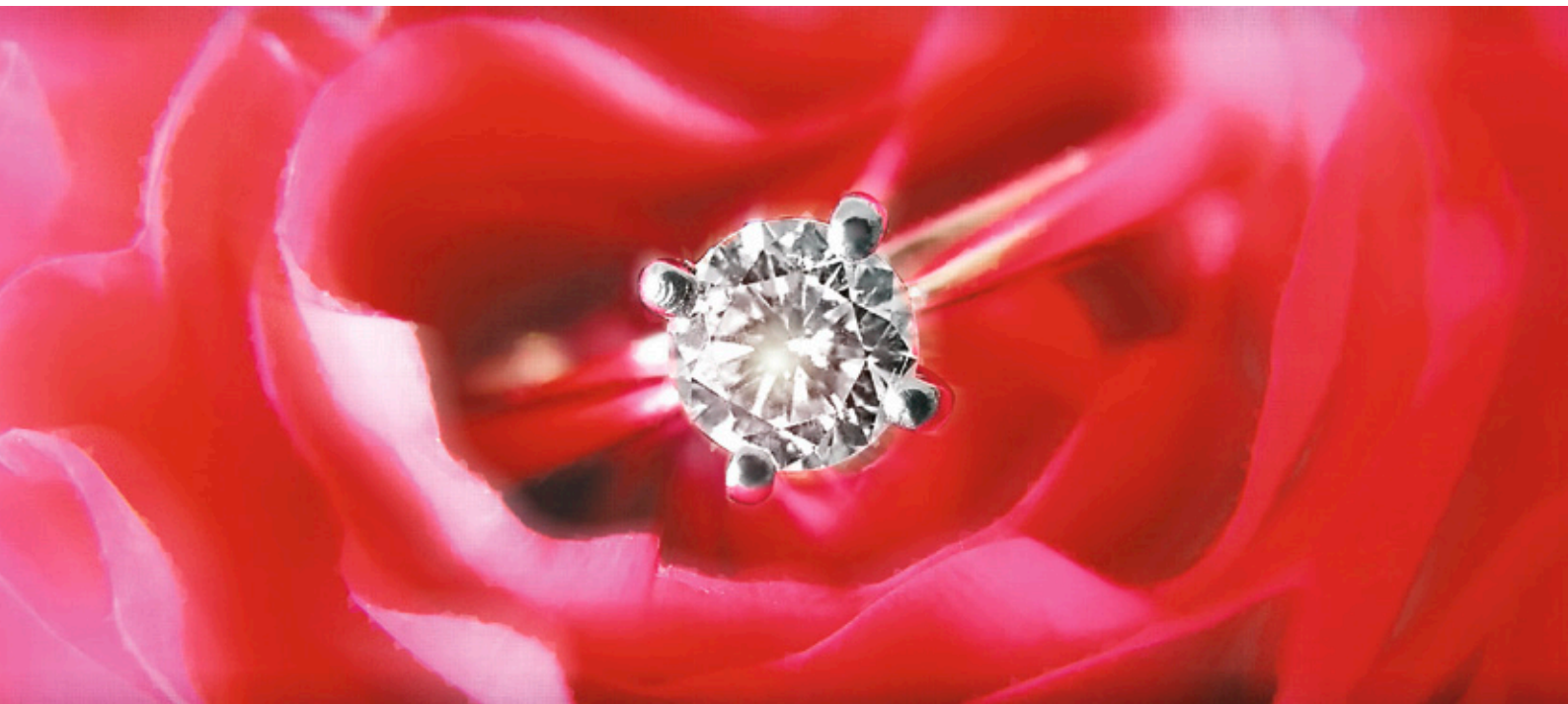

## Cor e Manuseio Revolucionários

Sistema DUO SHADE para harmonia natural –  
Duas cores em uma seringa

NANO Tecnologia Suíça de Uso Universal anterior/posterior



coltène   
whaledent®

# BRILLIANT

## New Line

A nossa fórmula é ainda mais avançada, no sentido de acompanhar os requisitos e necessidades de nossos clientes. O BRILLIANT New Line incorpora os avanços das cargas esféricas com tamanho nanométrico, o que oferece excelentes características de manuseio, resistência e mistura. Os resultados estão à vista: excelentes restaurações para todas as indicações.

### A NANO FÓRMULA OFERECE: CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO INCOMPARÁVEIS

- Não pegajoso – ideal para moldagem
- Compósito condensável e moldável dentro da cavidade dental
- Excelente para todas as classes (anterior/posterior)
- Adapta-se completamente à base da cavidade sem formação de bolhas de ar
- Não adere no instrumento após a inserção
- Adaptação marginal e pontos de contato excelentes

### SUCESSO CLÍNICO – USO UNIVERSAL



#### Caso Clínico – Dentes Anteriores

Restauração com BRILLIANT New Line (A2/B2). A modelagem dos contornos anatômicos naturais é possível devido à consistência estável e não pegajosa. Redução do tempo necessário para recontorno anatômico com instrumentos de acabamento.



#### Caso Clínico – Dentes Posteriores

Restaurações com Brilliant New Line (A3/D3)

# Conceito Duo Shade

## SISTEMA DUO SHADE ÚNICO PARA FACILITAR E SIMPLIFICAR A SELEÇÃO DE CORES

Situação cotidiana num consultório dentário.



A escala de cores clássica Vita™ é muitas vezes a base para determinar as tonalidades. No entanto, a seleção da tonalidade correta pode ser difícil. Duas ou mesmo três tonalidades podem estar "próximas". Com base neste conhecimento, a Coltène/Whaledent desenvolveu o conceito Duo Shade.



Graças a este desenvolvimento, podemos resolver satisfatoriamente os importantes aspectos de uma fácil e rápida seleção de cor e da disponibilidade de um sistema simples com ampla gama de cores.

## AS MELHORES PROPRIEDADES DE HARMONIZAÇÃO.

As pesquisas científicas em Universidades e os testes in vivo confirmam que, em situações clínicas em que há estrutura de dente suficiente, o conceito BRILLIANT New Line Duo Shade reproduz de forma ótima a tonalidade Vita™ pretendida!


## ESCALA DE COR ÚNICA

A escala de cor BRILLIANT New Line apresenta uma opção de seleção de tonalidade única ao realizar uma restauração utilizando a técnica de estratificação. Ela é baseada no princípio "corpo e superfície", ou seja, pode-se selecionar cores de esmalte e dentina separadamente.

## MELHORES RESULTADOS ESTÉTICOS COM MENOS ESFORÇO.

O paciente e o profissional ficarão entusiasmados com o efeito camaleão, que mimetiza a cor com o dente natural. Resultados altamente estéticos são alcançados com uma seleção de cores simples e segura através do Conceito Duo Shade, com poucas seringas de resina. Melhores resultados estéticos com menos esforço.

### Restaurações do tipo IV em dente Vita\* A2 e B2 com BRILLIANT New Line Tonalidade A2/B2

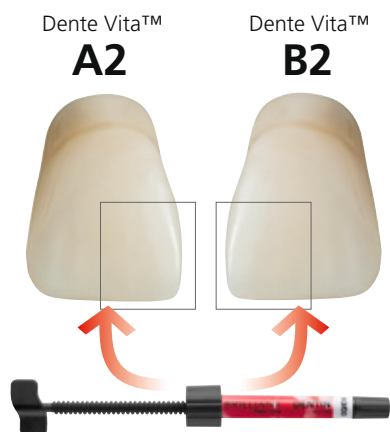

Restaurações invisíveis usando dois tons em uma só seringa A2/B2.

Tonalidade de Dentina "corpo" \_\_\_\_\_

Tonalidade de Esmalte "cobertura" \_\_\_\_\_

Esmalte sobre Dentina \_\_\_\_\_

Tonalidade Final \_\_\_\_\_

\* Não é marca registrada de Coltène/Whaledent

# Nano Tecnologia

## A NANO FÓRMULA FORNECE ...

Com a implementação de partículas nano, uma melhor distribuição de tamanho das partículas foi conseguida. Isto melhora o polimento, a manipulação, a resistência e reduz a contração de polimerização.

## CARACTERÍSTICAS DE MANUSEIO SUPERIORES, NÃO PEGAJOSO E DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL

Coloque compósito num bloco de espatular e seccione com um instrumento. Se o material "se deslocar", não é possível uma moldagem adequada da forma anatômica à temperatura bucal.




BRILLIANT New Line  
Consistência firme – não se nivela

## FLUORESCÊNCIA


O BRILLIANT New Line tem uma substância fluorescente incorporada, que emite luz visível ao ser exposta à luz ultravioleta, para reproduzir um brilho e vitalidade naturais com uma série de condições de luz.

## ... E UM POLIMENTO MUITO BRILHANTE EM TEMPO REDUZIDO


Figuras SEM após o polimento

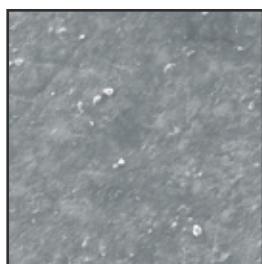


BRILLIANT New Line alcança altos valores de brilho final devido à uma melhor distribuição de suas partículas.

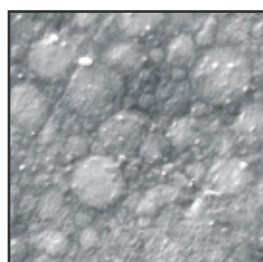

Filtek Z350\*

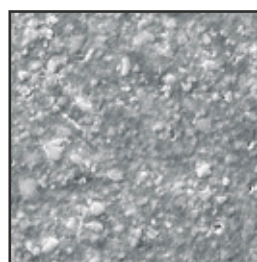

Premise\*

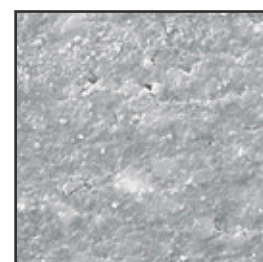

Tetric EvoCeram\*



# One Coat **Bond SL**

**SOMENTE UMA GOTTA –  
SOMENTE UMA APLICAÇÃO**

## **UM ADESIVO DE ESMALTE E DENTINA EFICAZ**

A natureza hidrofílica de One Coat Bond SL garante boa umectação na superfície dental e facilita a completa penetração nas fibras de colágeno e túbulos dentários.

## **LIVRE DE SOLVENTE – CAMADA HOMOGÊNEA DE ADESIVO**

One Coat Bond SL é compatível com água e não requer um solvente. Deste modo, One Coat Bond SL reduz a sensibilidade pós-operatória associada ao uso de solventes, ao mesmo tempo que garante uma composição consistente e homogênea da primeira à última gota.


## **SIMPLICIDADE**

Basta dispensar uma gota no aplicador microbrush e pincelar a área de restauração previamente delimitada.

## **ECONÔMICO**

Com o mecanismo de dosagem do frasco pode controlar a quantidade colocada no aplicador e, em seguida, nos dentes, evitando as embalagens individuais dispendiosas. Com One Coat Bond SL concentrado, uma única gota é tudo que você precisa. Centenas de aplicações por frasco. Isento de evaporação até a última gota.



  
Aplique por  
20 s



  
Fotopolimerize  
por 30 s

## **ETCHANT GEL S**



**35 % Ácido fosfórico**

## **POSICIONAMENTO PRECISO**

A ponta fina e flexível permite colocar One Coat Bond SL Ácido em gel exatamente onde é preciso, mesmo nas áreas mais difíceis de alcançar.

## **CONSISTÊNCIA FLUIDA**

Flui facilmente ao local sem gotejar ou escorrer.

## **FÁCIL REMOÇÃO**

Enxágua facilmente e a coloração azul-clara indica claramente que foi bem enxaguado.



## INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

### 8950 BR BRILLIANT New Line Intro Kit Syringes 6 Seringas

BRILLIANT New Line dentina:  
A1/B1, A2/B2, A3/D3 3 x 4 g

BRILLIANT New Line esmalte:  
A1/B1, A2/B2, A3/D3 3 x 4 g

ONE COAT BOND SL 1 x 5 ml  
ETCHANT GEL S 1 x 2.5 ml

Escala de cores  
BRILLIANT New Line  
Acessórios

### 8979 BR BRILLIANT New Line Intro Kit Syringes Sem escala de cores 6 Seringas

BRILLIANT New Line dentina:  
A1/B1, A2/B2, A3/D3 3 x 4 g

BRILLIANT New Line esmalte:  
A1/B1, A2/B2, A3/D3 3 x 4 g

ONE COAT BOND SL 1 x 5 ml  
ETCHANT GEL S 1 x 2.5 ml

Acessórios

### REPOSIÇÕES

**1 x 4 g**  
**8951 BR** Dentin A1/B1  
**8952 BR** Dentin A2/B2  
**8953 BR** Dentin A3/D3  
**8954 BR** Dentin A3.5/B3

**8960 BR** Enamel A1/B1  
**8961 BR** Enamel A2/B2  
**8962 BR** Enamel A3/D3  
**8963 BR** Enamel A3.5/B3  
**8964 BR** Enamel C2/C3  
**8965 BR** Enamel A4/M5  
**8968 BR** Transparent  
**8974 BR** Super White

### ACESSÓRIOS

**8990 BR** Escala de cores  
BRILLIANT New Line

**7430 BR** One Coat Bond SL (1 x 5 ml)  
**7634** Micro-aplicadores  
pretos (50 unid.)  
**7373** Etchant Gel S (2 x 2.5 ml)  
**7876** Agulhas para aplicação do  
Etchant (20 unid.)

www.coltenewhaledent.com  
© 2009 Coltène/Whaledent AG

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
info@coltenewhaledent.ch

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
Tel. +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
info@coltenewhaledent.com

**coltène**  
**whaledent**