

PRESIDENT

The Original

putty / putty soft / putty super soft / fast putty soft

Инструкция по применению

RU

Перед применением внимательно прочитайте эту инструкцию.

Описание продукта

PRESIDENT The Original – это двухкомпонентный оттискный материал на основе поливинилсилоксанов аддитивной полимеризации. Он включает корректирующие материалы (PRESIDENT The Original regular body, light body и Xtra light body) и базовые материалы (PRESIDENT The Original putty, putty soft, fast putty soft, putty super soft, heavy body и MonoBody). После ручного смешивания базы и активатора или смешивания при помощи смесительной насадки материалы PRESIDENT The Original образуют пасты, которые можно использовать отдельно или комбинировать между собой в качестве оттискного материала, обычно совместно со стандартными или индивидуальными оттискными ложками в стандартной технике снятия оттисков.

Назначение

PRESIDENT The Original («стоматологический оттискный материал») предназначен для регистрации текущей клинической ситуации в полости рта пациента при реставрации зубов, изменении их формы или при протезировании.

Состав PRESIDENT The Original putty

Силиконовый эластомер аддитивной полимеризации, высокой вязкости (putty).

- Поливинилсилоксаны
- Цвет: жёлтый

Состав PRESIDENT The Original putty soft

Силиконовый эластомер аддитивной полимеризации, высокой вязкости (putty).

- Поливинилсилоксаны
- Цвет: коричневый

Состав PRESIDENT The Original fast putty soft

Силиконовый эластомер аддитивной полимеризации, высокой вязкости (putty).

- Поливинилсилоксаны
- Цвет: коричневый

Состав PRESIDENT The Original putty super soft

Силиконовый эластомер аддитивной полимеризации, высокой вязкости (putty).

- Поливинилсилоксаны
- Цвет: оранжевый

Показания

- Материал для базового слоя при технике двуслойного одноэтапного оттиска
- Базовый материал для техники двуслойного двухэтапного оттиска

Противопоказания

- Не использовать при известной аллергии на компоненты оттискных материалов PRESIDENT The Original.
- В случае подвижности зубов возможно ее усиление или экстракция зубов при снятии оттиска.

Указания по безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Оттиски, контактирующие со слизистой полости рта, могут быть загрязнены. Соблюдайте указания по дезинфекции.
- Предназначен только для профессионального применения стоматологами и зубными техниками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Всегда работайте в нелатексных защитных перчатках. Выделения кожи, латексные перчатки и поверхности, загрязненные прикосновением таких перчаток, оказывают отрицательное влияние на процесс полимеризации поливинилсилоксанов. К материалу и поверхностям, с которых будет делаться оттиск (зубы, препарированные области, ретракционные нити и т. п.), можно прикасаться только в винило-вых или нитриловых перчатках. Полной полимеризации также могут препятствовать звенолосодержащие соединения и гемостатики. Если для дезинфекции применяется перекись водорода, рекомендуется затем тщательно промыть дезинфицированную поверхность тёплой водой во избежание образования пузырьков. Для достижения хорошего сцепления корректирующего материала базовый оттиск необходимо тщательно очистить и высушить перед дальнейшим использованием.
- Высокие температуры ускоряют процесс отверждения, а низкие замедляют его.
- Комбинирование материалов с оттискными материалами других производителей не допускается.
- Содержит нано материалы (связывающие компоненты)

Побочные эффекты и взаимодействия

Опасные реакции и побочные эффекты у пациентов и/или медицинского персонала не наблюдались.

Категории пользователей / пациентов

Использовать оттискные материалы PRESIDENT The Original в полости рта пациента разрешается только квалифицированным специалистам, таким как врачи-стоматологи и их ассистенты с соответствующей специализацией. Подходит для всех категорий пациентов.

ПОДГОТОВКА

Ложки

Для снятия оттисков можно использовать любые готовые или индивидуальные оттискные ложки, предназначенные для стоматологического применения. Для наилучшей адгезии рекомендуется перед применением нанести или расплыть на ложку тонкий слой COLTENE Adhesive или Adhesive AC. Тем самым предотвращается отделение оттискного материала во время извлечения из полости рта. Подробная информация о способе применения приводится в инструкции по применению COLTENE Adhesive или Adhesive AC.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Дозирование

Отмерьте из контейнера ложку базы и ложку активатора без горки.

Рабочее время

putty / putty soft / putty super soft



fast putty soft



Смешивание

Возьмите базовый материал и активатор и начните замешивание компонентов кончиками пальцев. Перемешивайте материал, пока не добьётесь однородного цвета (не менее 30 секунд). Рекомендуется использовать секундомер. При использовании механических смешивающих устройств соблюдайте инструкцию производителя. После успешного замешивания сформируйте жгут материала и сразу поместите его в оттискную ложку.

Оттиск

Введите оттискную ложку, заполненную оттискным материалом, в полость рта и позиционируйте её в течение 2-3 секунд, удерживая на месте до полного отверждения материала.

Способы проверки правильности применения

Остаток материала требуется значительно больше времени для полимеризации при комнатной температуре, чем в полости рта. В связи с этим, перед извлечением из полости рта убедитесь, что материал окончательно полимеризовался. Если ручной тест нажатием не оставляет вмятины на оттискном материале спустя время, указанное в разделе «Рабочее время», оттиск можно извлекать из полости рта пациента. Однако если после теста остаётся отчётливая вмятина в материале, значит он ещё не полимеризовался полностью.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Очистка оттиска

После извлечения первичного оттиска из полости рта пациента, оттиск необходимо тщательно промыть, прежде чем нанести корректирующие материалы. После очистки готовые оттиски можно дезинфицировать предлагаемыми в продаже специальными дезинфицирующими растворами (напр., Dürr Dental SE, MD 520 для дезинфекции оттисков) для стоматологических оттискных материалов и просушить сжатым воздухом.

Очистка ложек

Оттиск можно удалить из ложки подходящим тупым инструментом. Остатки адгезива можно растворить, поместив в обычный универсальный растворитель или бензин.

Изготовление моделей

Идеальное время: в период от 30 минут до 72 часов после снятия оттиска. Кратковременная промывка оттиска с моющим средством и последующее тщательное ополаскивание тёплой водой уменьшает поверхностное натяжение и облегчает отливку модели. Можно использовать любые стандартные стоматологические гипсы (например, Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).

Срок годности и хранение

- Срок годности: см. первичную упаковку
- Температура хранения: 15-23 °C / 59-73 °F
- Относительная влажность: 50 % ± 10 %
- Срок хранения после первого вскрытия: 3 месяца

Оберегать от воздействия тепла и солнечного света. Не допускать сильных перепадов температуры. Закрывайте контейнеры сразу после использования.

Утилизация

Оттискные материалы PRESIDENT The Original в небольших количествах можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Оттискный материал PRESIDENT The Original, который находился в полости рта пациента, необходимо утилизировать в соответствии с нормативами, принятыми в соответствующей стране.

Технические данные согласно ISO 4823

Измерения выполнены при комнатной температуре 23 °C / 73 °F и относительной влажности 50 %.

Время замешивания (15 мл):	00:30 мин
Общее рабочее время:	1:10 мин
Время полимеризации в полости рта (35 °C / 95 °F):	
putty / putty soft / putty super soft	3:00 мин
fast putty soft	2:00 мин

Обязательное информирование

О всех серьёзных происшествиях в связи с использованием данного продукта следует немедленно информировать производителя и ответственные инстанции.

For SDS see
www.coltene.com



Glossary

- Consult instructions for use
- Keep away from sun light
- Temperature limitation
- Notified body registration number
- Identification for Russia
- Identification for Ukraine
- Legal Manufacturer
- Expiry Date
- Batch Code
- RX only
- Medical Device
- Manufacturing Date
- Unique Device Identifier
- European Authorized Representative
- Reference Number

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

COLTENE